

Diagnostic DM-300 IHB, automatyczny ciśnieniomierz naramienny



Cena: 178,31 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	ciśnieniomierz
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny **Diagnostic DM-300 IHB** to urządzenie przeznaczone do domowego pomiaru ciśnienia krwi. Aparat mierzy ciśnienie i puls na ramieniu metodą oscylometryczną, co oznacza, że wykrywa ruch krwi w tętnicach i po analizie wyświetla wynik na ekranie.

Zastosowanie

Ciśnieniomierz przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.

Sposób użycia

- Załóż mankiet około 1-2 cm nad stawem łokciowym. Dla najlepszych rezultatów załóż mankiet na nagie ramię, na poziomie serca.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Najpierw następuje pompowanie do ciśnienia początkowego. Jeżeli ciśnienie skurczowe bieżącego użytkownika jest większe niż 190 mmHg, urządzenie automatycznie zmieni napełnienie do odpowiedniego poziomu.
- Po napompowaniu mankieta powietrze będzie powoli spuszczone, zgodnie ze wskazaniem ciśnieniomierza. Jednocześnie na ekranie będzie migać symbol serca, sygnalizując bicie serca.
- Po zakończeniu pomiaru usłyszemy trzy krótkie sygnały dźwiękowe.
- Na ekranie wyświetlą się wartości pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
- Z lewej strony ekranu pojawi się wskaźnik ciśnienia krwi według klasyfikacji WHO.
- Przyciskiem wyłącz urządzenie w dowolnym trybie lub pozostaw, a ciśnieniomierz wyłączy się samoczynnie po około 3 minutach bezczynności.

Ostrzeżenia

Ten ciśnieniomierz nie jest zalecany osobom z ciężką arytmia.

Ważne wskazówki



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- WYROBU NIE NALEŻY POZOSTAWIĆ BEZ NADZORU.
- Przechowuj wyrób w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Urządzenie zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte.
- Pomiary ciśnienia krwi powinny być interpretowane wyłącznie przez pracownika służby zdrowia, który zna historię medyczną pacjenta.
- Unikaj skrajnych temperatur.
- Nie wystawiaj urządzenia bezpośrednio na światło słoneczne.

Producent

Diagnosis S.A.
ul. Generała W. Andersa 38A
15-113 Białystok