

Diagnostic Gold Strip, paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi, 50 sztuk



Cena: 39,58 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diagnostic Gold Strip to paski testowe do samodzielnego pomiaru poziomu glukozy we krwi, dostępne w opakowaniach po 50 sztuk. Są to wyroby medyczne, które można nabyć za pełną odpłatnością lub w ramach refundacji na receptę lekarską. Paski te współpracują z glukometrem Diagnostic Gold.

Wskazania

Pasek testowy do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic Gold Strip przeznaczony jest do samodzielnego pomiaru poziomu glukozy przez pacjenta w pełnej krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca, dłoni, przedramienia lub ramienia. Pasek przeznaczony jest do użytku zewnętrznego (diagnostyka in vitro), wyłącznie z glukometrem Diagnostic Gold.

Działanie

- Pasek testowy do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic Gold Strip posiada elektrodę, która mierzy poziomy glukozy.
- Glukoza zawarta w próbce krwi miesza się z odczynnikami na pasku testowym, co powoduje powstanie prądu elektrycznego o niewielkim natężeniu.

Natężenie wytworzonego prądu zależy od ilości glukozy we krwi.

- Glukometr Diagnostic Gold mierzy natężenie prądu i przelicza wynik pomiaru na ilość glukozy zawartej we krwi.
- Wartość stężenia glukozy pojawia się na wyświetlaczu LCD glukometru.
- Gdy kropla krwi zostanie wchłonięta przez końcówkę paska testowego Diagnostic Gold Strip, pole reakcyjne paska automatycznie zasysa krew przez siły kapilarne.
- Kiedy całe pole reakcyjne (żółte pole) jest wypełnione, glukometr Diagnostic Gold rozpoczyna pomiar poziomu glukozy. To prosty i praktyczny system codziennego monitorowania poziomu glukozy.



Skład

Substancja czynna (na 100 pasków):

- Oksydaza glukozy (GOD) 300 jednostek
- Cyjanożelazian potasu (nośnik elektronów) 9,0 mg

Sposób użycia

- Umyj dokładnie ręce wodą z mydłem i osusz je czystym ręcznikiem.
- Wyjmij pasek testowy z pojemnika i natychmiast z powrotem zamknij wieczko.
- Włóż pasek testowy do glukometru Diagnostic Gold i poczekaj, aż urządzenie włączy się.
- Wykonaj nakłucie za pomocą nakłuwacza, np. Opilets.
- Kiedy uformuje się odpowiednia kropla krwi, przyłóż końcówkę paska w glukometrze do kropli, aż odpowiednia jej ilość zostanie wciągnięta do paska.
- Poczekaj 5 sekund i odczytaj wynik na ekranie glukometru.
- Po wyjęciu paska, glukometr wyłączy się.
- Oczyszczyć miejsce nakłucia.
- Wyrzucić zużyty pasek i lancet nakłuwacza do odpowiedniego pojemnika.

Ostrzeżenia

- Paski testowe należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia pojemnika.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok