

Diagnostic Nano, inhalator kompresorowy tłokowy, 1 sztuka

Cena: 155,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj produktu	Suplement diety
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diagnostic NANO to medyczny inhalator kompresorowy tłokowy, który dostarcza lek w formie aerozolu do dolnych dróg oddechowych pacjenta.

Wskazania

Inhalator Diagnostic NANO został opracowany do leczenia astmy, alergii i innych chorób układu oddechowego.

Działanie

Produkt wytwarza strumień powietrza, który prowadzony do nebulizatora umożliwia rozpylenie znajdującego się w nim leku do postaci łatwej do inhalacji mgiełki.

Sposób użycia

1. Wlej lek do nebulizatora w ilości zaleconej przez lekarza.
2. Podłącz ustnik lub maskę.
3. Podłącz wtyczkę inhalatora do prądu.
4. Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty i znajduje się w inhalatorze.
5. Podłącz przewód powietrzny do nebulizatora i do inhalatora.
6. Włącz zasilanie i rozpocznij inhalację.
7. W momencie opróżnienia pojemnika na lek zakończ inhalację.
8. Wyłącz inhalator, odłącz przewód powietrzny.
9. Wyczyść urządzenie i akcesoria zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Przeciwwskazania

- Nie używaj urządzenia jeśli wydaje ono dziwne dźwięki.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacji.
- Nie należy inhalować pacjentów nieprzytomnych i bez spontanicznej czynności oddechowej. Urządzenie nie jest przeznaczone



do znieczulenia ani wentylowania płuc.

Właściwości

- Urządzenie przeznaczone jest do pracy przerywanej (30 minut pracy, 30 minut przerwy).
- Zbiornik na lek może pomieścić jednorazowo nie więcej niż 8 ml płynu.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok