

Diagnostic NC PRO, termometr na podczerwień, bezdotykowy

Cena: 164,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Dianostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termometr **Diagnostic NC PRO** zapewnia bezpieczny i szybki pomiar temperatury w ciągu zaledwie 1 sekundy. Umożliwia higieniczne sprawdzanie temperatury u wszystkich członków rodziny. Bezdotykowa konstrukcja termometru pozwala na mierzenie temperatury ciała na czole oraz w innych miejscach, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, w domowych warunkach.

Ostrzeżenia

- Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Gdy wystąpi gorączka, należy skonsultować się z lekarzem zamiast samodzielnie stawiać diagnozę.
- Wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione.
- Nie należy wystawiać termometru na działanie czynników mechanicznych i nie należy go używać, jeśli jest uszkodzony.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, na przykład w pobliżu źródeł łączności bezprzewodowej lub telefonów komórkowych.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się termometrem.
- Nie należy wystawiać termometru na bezpośrednie światło słoneczne, ciepło, wilgoć lub zanieczyszczenia.
- W razie potrzeby wymienić baterie.
- Temperatura otoczenia w mieszkaniu może być różna w zależności od pomieszczenia. Przed pomiarem temperatury użytkownik oraz termometr powinien pozostawać w tym samym pomieszczeniu (pomieszczeniach) o stałych warunkach środowiskowych przez co najmniej 15 minut.
- Przed rozpoczęciem pomiaru należy usunąć zanieczyszczenia, pot oraz odgarnąć włosy z obszaru pomiaru.
- Nie należy mierzyć temperatury podczas lub bezpośrednio po karmieniu.
- Użytkownik nie powinien spożywać jedzenia ani napojów bezpośrednio przed lub podczas pomiaru temperatury.
- Nie należy wkładać termometru do kieszeni przed użyciem, ponieważ może on ulec podgrzaniu.

- Za każdym razem, przed rozpoczęciem pomiaru należy upewnić się, że soczewki czujników pomiarowych nie są zanieczyszczone. W przypadku zanieczyszczenia należy je wyczyścić.
- We wczesnych stadiach choroby z gwałtownym wzrostem temperatury do wysokich wartości obserwuje się efekt „białej hipertermii” – schorzenia, które cechuje się zwężeniem naczyń, a skóra staje się biała i pozostaje zimna. W takich przypadkach nie należy przeprowadzać pomiarów temperatury na czole, ponieważ temperatura skóry będzie niska.
- Pomiar temperatury powinien być przeprowadzony pod opieką osoby dorosłej. Nie wolno dopuścić do tego, by dziecko usunęło pokrywę na baterie, wyjęło i ewentualnie połączyło baterię.
- Termometr należy przechowywać z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

Producent
DIAGNOSIS