

Diagnostic T-02 Flexible termometr elektroniczny z elastyczną końcówką, 1 sztuka



Cena: 14,26 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Termometr Diagnostic T-02 Flexible to urządzenie medyczne przeznaczone do mierzenia temperatury ciała u osób w każdym wieku – idealny dla całej rodziny.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony dla wszystkich członków rodziny, do pomiaru temperatury w jamie ustnej, pod pachą oraz w odbycie.

Sposób użycia

Pomiar pod pachą:

1. Włącz urządzenie, poczekaj aż przejdzie ono do trybu pomiaru.
2. Wytrzymaj pachę, umieść końcówkę pomiarową w dole pachowym i mocno przyciśnij ramieniem do ciała.
3. Odczekaj do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, jednak dla lepszej dokładności pomiaru zaleca się wydłużyć pomiar pod pachą o dodatkowe 5 minut. Prawidłowy zakres temperatury: 35,2 - 36,7°C (95,4 - 98,1°F)
4. Odczytaj wynik na wyświetlaczu.

Pomiar w jamie ustnej:

1. Włącz urządzenie, poczekaj aż przejdzie ono do trybu pomiaru.
2. Umieść końcówkę pomiarową w zagłębieniu pod językiem, zgodnie z obrazkiem znajdującym się w instrukcji obsługi.
3. Odczekaj do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, jednak dla lepszej dokładności pomiaru zaleca się wydłużyć pomiar o dodatkowe 2 minuty. Prawidłowy zakres temperatury: 35,7 - 37,3°C (96,3 - 99,1°F)
4. Odczytaj wynik na wyświetlaczu.

Pomiar w odbycie:



1. Włącz urządzenie, poczekaj aż przejdzie ono do trybu pomiaru.
2. Posmaruj końcówkę pomiarową wazeliną i delikatnie wsuń ją do odbytu na głębokość około 1 cm.
3. Oczekaj do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, jednak dla lepszej dokładności pomiaru zaleca się wydłużyć pomiar o dodatkowe 2 minuty. Prawidłowy zakres temperatury: 36,2 - 37,7°C (97,2 - 99,9°F)
4. Odczytaj wynik na wyświetlaczu.

Przeciwwskazania

- Nie stosować do pomiaru temperatury w uchu.
- Nie stosować wyników do samodzielnej diagnozy.
- Nie używać jeśli termometr jest mokry.
- Nie należy wciskać na siłę termometru do odbytnicy.
- Nie używać termometru w jamie ustnej bezpośrednio po użyciu w odbytnicy.
- Nie należy wykonywać pomiaru temperatury w jamie ustnej u dzieci w wieku 2 lat i poniżej.

Uwagi

- Po każdym użyciu należy zdezynfekować urządzenie, szczególnie jeśli jest używane przez więcej niż jedną osobę.
- Należy zachować minimum 30 sekund odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami.
- W przypadku przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C, przed pomiarem należy umieścić je na minimum 15 minut w temperaturze 5-40°C.
- Wstrząsy mechaniczne, upadki, przenośne i ruchome sprzęty komunikacyjne RF, przechowywanie i praca urządzenia poza dopuszczalną temperaturą lub temperatura ciała pacjenta poniżej temperatury otoczenia mogą wpływać na wydajność termometru.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok
diagnosis@diagnosis.pl