

Diagnostic T-15, termometr elektroniczny, 1 sztuka

Cena: 13,29 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diagnostic T-15 to elektroniczny termometr medyczny przeznaczony do pomiaru temperatury ciała zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Umożliwia wykonanie pomiaru trzema metodami: pod pachą, w jamie ustnej oraz w odbycie.

Działanie

Termometr mierzy temperaturę dzięki czujnikowi do pomiaru temperatury, a wynik ukazywany jest na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

Przeznaczenie

Do mierzenia temperatury ciała pod pachą, w jamie ustnej, w odbycie.

Sposób użycia

- Wcisnąć włącznik/wyłącznik, który znajduje się obok ekranu. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli ostatni pomiar. Następnie termometr przejdzie w tryb gotowości do pomiaru. Litera L z migającym symbolem stopni Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F) informuje w jakiej skali będzie dokonany pomiar.
- Pomiar temperatury w ustach: Należy umieścić czujnik termometru na około 1 min. w jamie ustnej, pod językiem. Celem zachowania dokładności pomiaru, należy trzymać usta zamknięte i oddychać swobodnie, przez nos. Normalny zakres temperatury przy tej metodzie wynosi 35,7-37,3°C.
- Pomiar temperatury w odbycie: Przed wykonaniem pomiaru nasmarować końcówkę czujnika wazeliną, celem łatwiejszego wprowadzenia jej do środka odbytu. Delikatnie włożyć końcówkę na około 1 cm do odbytu. Normalny zakres temperatury przy tej metodzie wynosi 36,2-37,7°C.
- Pomiar temperatury pod pachą: Z medycznego punktu widzenia metoda ta daje najmniej precyzyjny wynik. Przed wykonaniem pomiaru należy przetrzeć skórę pod pachami suchym ręcznikiem. Końcówkę urządzenia należy umieścić pod ramieniem i trzymać mocno przyciśnięte do boku. Normalny zakres temperatury przy tej metodzie wynosi 35,2-36,7°C.

Właściwości

Termometr T-15 marki Diagnostic umożliwia szybki i bardzo precyzyjny pomiar temperatury ciała. Może być stosowany zarówno w



warunkach domowych jak i szpitalnych. Urządzenie może wyświetlać wyniki w skali Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).

Ostrzeżenia

- Przed użyciem termometru przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi załączoną do opakowania.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Zachowaj ostrożność w trakcie użytkowania. Nie wolno upuszczać urządzenia, gdyż nie jest odporny na wstrząsy. Nie wolno zginać termometru. Nie wolno wkładać końcówki do wrzącej wody. Należy chronić termometr przed działaniem promieni słonecznych.
- Nie próbować demontować urządzenia, za wyjątkiem wymiany baterii.

Producent

DIAGNOSIS S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok