

Diather Covid-19 Antygen, test antygenowy ze śliny na obecność wirusa SARS-CoV-2, 1 sztuka

Cena: 22,28 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIATHER
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diather Covid-19 Antygen to szybki test diagnostyczny służący do wykrywania obecności wirusa SARS-CoV-2.

Zastosowanie

Szybki test jednorazowego użytku do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbce ludzkiej śliny samodzielnie pobranej od osób z objawami podejrzewanych o zakażenie lub zakażonych COVID-19.

Sposób użycia

Co najmniej 10 minut przed pobraniem próbki nie wkładać niczego do ust (jedzenia, picia, gumy do żucia, wyrobów tytoniowych). Dodatkowo co najmniej przez 20 sekund przed badaniem należy umyć dokładnie ręce wodą z mydłem lub użyć środka dezynfekującego zawierającego minimum 60% alkoholu.

1. Pobieranie próbki

Rozpakować lejek oraz plastikową probówkę, założyć lejek na probówkę. Głęboko zakastać od 3 do 5 razy (należy pamiętać o zachowaniu dystansu od innych osób oraz założeniu maseczki ochronnej lub zakryciu ust i nosa chusteczką higieniczną). Delikatnie wypłuć ślinę do lejka (ślina bez pęcherzyków powietrza, powinna sięgać do wysokości linii zaznaczonej na probówce. Jeśli ilość śliny jest niewystarczająca należy powtórzyć czynność pobierania próbki i wyrzucić zużyty lejek do plastikowej torebki na odpady).

2. Przygotowanie próbki

Otworzyć folię z buforem i włożyć cały bufor do próbki ze śliną. Zamocować końcówkę zakraplającą na probówce. Probówkę delikatnie naciskać od 10 do 15 razy w celu wymieszania próbki.

3. Badanie

Otworzyć foliową saszetkę i wyjąć z niej kasetkę testową, użyć do badania w przeciągu godziny. Kasetkę testową umieścić na płaskiej i gładkiej powierzchni, odwrócić probówkę i wkropić 2 krople roztworu do studzienki S kasety testowej i włączyć minutnik. Nie ruszać kasety podczas oczekiwania na wyniki testu.

4. Wyniki

Wynik odczytać po upływie 15 minut (nie interpretować wyniku po 20 minutach). Po zakończeniu badania wszystkie składniki testu umieścić w plastikowej torbie na odpady i wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie używać żadnych elementów zestawu ponownie. Po wyrzuceniu testu należy dokładnie umyć dłonie.

5. Interpretacja wyników

Wynik pozytywny: pojawiają się dwie barwne linie w polu kontrolnym (C) i polu testowym (T).

Wynik negatywny: pojawia się jedna barwna linia w polu kontrolnym (C).

Wynik nieprawidłowy: brak linii kontrolnej.

Przeciwwskazania

- Nie należy używać testu po upływie terminu ważności.
- Nie należy jeść, pić ani palić w otoczeniu, w którym przechowywany jest zestaw testowy bądź próbki.
- Nie należy spożywać buforu zawartego w zestawie.
- Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone.
- Nie należy zamrażać wyrobu medycznego.

Ważne wskazówki

- Należy uważnie przeczytać instrukcję przed wykonaniem testu.
- Szybki test antygenowy przeznaczony jest wyłącznie do samokontroli, do diagnostyki in vitro.
- Test Diather Covid-19 Antygen jest wyrobem medycznym przeznaczonym do jednorazowego użytku.
- Należy zachować ostrożność w czasie pracy z buforem, unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami należy przepłukać dużą ilością bieżącej wody.
- Przed i po użyciu testu Diather Covid-19 Antygen należy dokładnie umyć ręce.
- W przypadku uzyskania wstępnego wyniku pozytywnego należy poinformować o nim lekarza pierwszego kontaktu i przestrzegać wytycznych oraz wymogów prawnych dotyczących COVID-19.
- Badanie dzieci i młodzieży powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zużyta kasetę testową należy wyrzucić zgodnie z przepisami prawa.
- Test na Covid-19 ze śliny należy przechowywać w temperaturze 2-30°C.

Producent

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
Hangzhou Economic and Technologic Development Area
Hangzhou 310018, Chiny