

Diather Test Angina Strep A, domowy test do wykrywania antygenów Streptococcus grupy A z wymazu z gardła, 1 sztuka

Cena: 33,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIATHER
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diather Test Angina Strep A to domowy, kasetkowy test diagnostyczny służący do jakościowego wykrywania antygenów Streptococcus grupy A w wymazie z gardła. Można go samodzielnie wykonać w domu, aby wstępnie potwierdzić bakteryjną infekcję gardła, jaką jest angina.

Test Angina Strep A Diather jest wskazany przede wszystkim przy bólu gardła, któremu towarzyszą objawy takie jak gorączka, ból głowy i wymioty.

Zastosowanie

Wyrób medyczny do samokontroli w domu służący do wykrywania antygenów Streptococcus grupy A w próbce z wymazu z gardła, pomagający we wstępnej diagnostyce infekcji bakteryjnej gardła (anginy).

Sposób użycia

- Przed wykonaniem testu zapoznaj się z instrukcją użytkowania i dokładnie umyj ręce.
- Otwórz opakowanie zawierające wymazówkę i wyjmij ją, chwytając za plastikowy uchwyt (unikaj dotykania rękami bawełnianej końcówki chłonnej).
- Stań przed lustrem, odchyl głowę do tyłu i otwórz usta tak szeroko, jak to możliwe.
- Używając jedną ręką szpatułki, naciśnij w dół język i pobierz próbkę z gardła za pomocą zawartej w zestawie wymazówki oraz szpatułki.
- Aby pobrać próbkę, drugą ręką szczotkuj miękkim bawełnianym wacikiem po tylnej części gardła, wokół migdałków i nad czerwonymi lub bolącymi obszarami (język podniebienie miękkie).



- Po pobraniu próbki z gardła włóż bawełnianą końcówkę chłonną wymazówki do probówki ekstrakcyjnej.
- Najpierw otwórz butelkę z zakraplaczem i dodaj odpowiednią liczbę kropli do probówki i zamknij butelkę.
- Następnie otwórz drugą butelkę, dodaj odpowiednią liczbę kropli do probówki i zamknij butelkę.
- Przytrzymaj wymazówkę za plastikowy uchwyt i obracaj nią wokół ścianek probówki (około 10 razy), aby wymieszać dokładnie roztwór.
- Pozostaw wymazówkę do inkubacji w środku probówki na co najmniej 2 minuty, lecz nie dłużej niż 5 minut.
- Pod koniec czasu inkubacji wyjmij probówkę ze statywu (wymazówka i płynny ekstrakt pozostają wciąż w probówce).
- Za pomocą kciuka i palca wskazującego naciśnij ścianki probówki, aby wycisnąć bawełnianą końcówkę wymazówki w celu zebrania jak największej ilości płynu.
- Wyrzuć wymazówkę do kosza, a probówkę z ekstraktem umieść w statywie.
- Zaaplikuj próbkę z roztworem na kasetkę testową i odczekaj 5-10 minut w celu zajścia reakcji.
- Odczytaj wynik testu po 5 minutach (nie interpretuj wyniku testu po upływie 10 minut).

Ostrzeżenia

Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem.

Ważne wskazówki

- Test jednorazowego użytku.
- Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zamrażać.

Producent

Microtrace Diagnostici Srl
Via IV Novembre 84
47863 Novafeltria RN, Włochy