

Diather Test Magni-Man, domowy test do oznaczania stężenia plemników, płodność mężczyzn, 2 sztuki

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy



Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	DIATHER
Opakowanie	2 sztuki
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Test **Magni-Man** marki **Diather Diagnostic & Therapy** to test kasetkowy używany do jakościowego oceniania stężenia plemników w próbce nasienia w domowych warunkach.

Zastosowanie

Diagnostyka i obserwacja leczenia niepłodności u mężczyzn.

Sposób użycia

- Próbkę nasienia należy pozyskać poprzez stymulację ręczną (masturbację) bezpośrednio do załączonego do zestawu pojemnika.
- Następnie konieczna jest 15-minutowa inkubacja próbki w pojemniku ze sproszkowanym odczynnikiem w celu jej upłynnienia, tak aby możliwe było dalsze przeprowadzenie testu.
- Do pobierania nasienia nie należy stosować prezerwatyw.
- Należy zwrócić uwagę na odpowiedni czas reakcji nasienia z roztworami.
- W przypadku, gdy nie obserwuje się prawidłowego nasiąkania błony w okienku A, może to wskazywać na zbyt wysoką gęstość próbki i wówczas zaleca się powtórzenie testu z zachowaniem procedury testowej, a w szczególności wykorzystanie do pobrania próbki nasienia pojemnika załączonego do zestawu.
- Następnie kroplę próbki należy nanieść w odpowiednie miejsce na kasetce testowej i odczytać wynik po 2 minutach.
- Wynik odbiegający od normy oznacza, że stężenie plemników w próbce jest niższe niż graniczny poziom testowy (poniżej 15 mln/ ml) i powinien zostać konsultowany z lekarzem.

Właściwości

- Szybki (wynik w 2 minuty),



- Wygodny w użyciu,
- Dyskretny,
- Wiarygodny wynik.

Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku.
- Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia.
- Pobranie nasienia przed upływem 2 dni lub po 7 dniach od ostatniej ejakulacji może wpłynąć negatywnie na dokładność wykonanego testu.
- Nie należy stosować próbki pobranej wcześniej niż 12 godzin przed rozpoczęciem testu.
- Wynik odbiegający od normy nie oznacza, że po stosunku kobieta nie zajdzie w ciążę i nie powinien być on traktowany jako powód do unikania stosowania antykoncepcji.

Producent

Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd
550 Yinhai Street
Hangzhou 310018, Chiny