

Diather Test Menopauza, domowy test do wykrywania FSH w moczu, 2 sztuki

Cena: 21,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	DIATHER
Opakowanie	2 sztuki
Postać	test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Diather Test Menopauza to domowy test strumieniowy przeznaczony do samodzielnego oznaczania poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) w moczu. Ten wyrób medyczny do samokontroli służy do wykrywania początku okresu przekwitania u kobiet.

Zastosowanie

- Szybki test płytkowy do jakościowego wykrywania w moczu hormonu FSH o stężeniu 25 mIU/ml lub wyższym.
- Diagnozowanie początkowego okresu przekwitania u kobiet.

Sposób użycia

- Pobierz próbkę moczu do suchego, czystego pojemnika i zanurz w nim test na 15 sekund lub umieść test bezpośrednio pod strumieniem moczu.
- Odczekaj 3 minuty i sprawdź wynik.

Obecność barwnych pasków zarówno w polu testowym T, jak i w polu kontrolnym C oznacza, że wynik jest pozytywny, wykryto obecność hormonu FSH w stężeniu 25 mIU/ml lub większym. Obecność jednego paska w polu kontrolnym C oznacza, że wynik jest negatywny, natomiast obecność paska w polu testowym T, jednak jego brak w polu kontrolnym C oznacza, że test jest nieprawidłowy i należy go powtórzyć.

Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny do samokontroli.
- Test jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
- Przed wykonaniem badania dokładnie zapoznaj się z instrukcją użycia dołączoną do opakowania.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Test jednorazowego użytku.
- Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia. Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.
- Przechowuj w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zamrażaj.
- Po użyciu wszystkie elementy mogą zostać wyrzucone

Producent

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
550 Yinhai Street
Hangzhou 310018, Chiny