

Diather Test Narko Multi Mocz, szybki test panelowy do wykrywania narkotyków w moczu, 1 sztuka

Cena: 30,28 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIATHER
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Narko Multi to medyczny test panelowy umożliwiający samodzielne sprawdzenie obecności narkotyków w moczu. Produkt wykrywa aż 7 substancji: amfetaminę, kokainę, marihuanę, haszysz, ecstasy, opiaty i morfinę. Test pozwala szybko i łatwo zdiagnozować obecność niedozwolonych substancji w organizmie.

Zastosowanie

Jednorazowy domowy test panelowy do wykrywania narkotyków w moczu (jednoczesne wykrywanie w moczu amfetaminy, kokainy, marihuany, haszyszu, opatów, ecstasy i morfiny).

Sposób użycia

Pobrać próbkę moczu do czystego i suchego pojemnika.
Zanurzyć test w próbce moczu przez około 10-15 sekund.
Odczekać 5 minut, po czym sprawdzić wynik.

Wynik dodatni:

- gdy w badanym moczu znajduje się narkotyk lub jego metabolit w strefie kontrolnej C pojawia się barwny prążek.

Wynik ujemny:

- ujemny wynik reprezentowany jest przez dwa prążki pojawiające się w strefach testowej T i kontrolnej C,
- wystąpienie obu pasków to dobra wiadomość dla wszystkich badanych, oznacza brak obecności narkotyków w moczu.



Wynik nieważny:

- brak widocznych prążków lub pojawienie się jedynie tego zlokalizowanego w strefie testowej T oznacza nieważność przeprowadzonego badania i konieczność dokonania kolejnego.

Ważne wskazówki

- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego i jest wyrobem medycznym jednokrotnego użycia.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zamrażać.

Producent

W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd
No. 2, Zhongxin Street, Louzizhuang
Jinzhan Township, Beijing, Chiny