

Diather Test Narko THC, domowy test do wykrywania THC w moczu, marihuana i haszysz, 1 sztuka

Cena: 12,12 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIATHER
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diather Test Narko THC to szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do jakościowego wykrywania THC w moczu. Łatwy w użyciu test paskowy jest odpowiedni do domowego użytku i pozwala na określenie, czy osoba badana zażywała narkotyki zawierające Tetrahydrokannabinol (THC), takie jak marihuana lub haszysz, w ciągu ostatnich 3 do 10 dni. Test wykrywa THC przy stężeniu granicznym 50 ng/ml. Choć zainteresowanie narkotykami często pojawia się w okresie dojrzewania, problem ten dotyczy również dorosłych. Wczesne wykrycie problemu ułatwia pomoc osobie uzależnionej.

Zastosowanie

- Szybki test, przeznaczony do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko i gliadynom (DGP).
- Test Diather Narko THC wykazuje obecność THC w moczu badanej osoby, pozwalając na ocenę, czy w ciągu ostatnich 10 dni miała zażywać narkotyki zawierające marihuanę lub haszysz.

Sposób użycia

- Pobierz próbkę moczu do czystego i suchego pojemnika.
- Zanurz końcówkę paska testowego w próbce moczu przez 10-15 sekund.
- Odczekaj 5 minut na wynik.
- Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu testu.

Ważne wskazówki

Przed wykonaniem testu należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użycia dołączoną do zestawu.



Uwagi

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent

WHPM BIORESEARCH AND TECHNOLOGY