

Diather Test Nietolerancja, domowy test do wykrywania przeciwciał klasy IgA anty tTG i DGP, nietolerancja glutenu i celiakia, 1 sztuka

Cena: 45,44 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DIATHER
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Diather Test Nietolerancja umożliwia wykrycie we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) i gliadynom (DGP). Jest przeznaczony do identyfikacji obecności glutenu we krwi w przypadku pojawienia się niepokojących objawów lub jako kontrola przy zdiagnozowanej celiakii. Test jest prosty w użyciu, wymaga jedynie próbki krwi z palca, a wyniki są dostępne już po 15 minutach.

Zastosowanie

- Szybki test Diather Nietolerancja, przeznaczony jest do wykrywania we krwi i surowicy przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (tTG), która jest głównym autoantygenem rozpoznawanym przez przeciwciała skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich oraz przeciwciał skierowanych przeciwko gliadynom (DGP).
- Pozwala wykryć, czy badana osoba ma nietolerancję glutenu oraz może być podstawą do dobrania odpowiedniego sposobu dalszych badań w kierunku celiakii.
- Test może pomóc osobom cierpiącym na celiakię kontrolować prawidłowość stosowanej diety i wykluczenie przyczyn objawów, które mogłyby wskazywać na spożycie glutenu.

Sposób użycia

- Nakłuj opuszkę palca i pobierz próbkę krwi do pipety.
- Próbkę krwi wprowadź do studzienki S.
- Wprowadź 3 krople buforu do studzienki S.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Odczekaj 15 minut i sprawdź wynik.
- Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w opakowaniu testu.

Dodatkowe informacje

- Dokładność testu (tTG: transglutaminaza tkankowa) wynosi 98%.
- Dokładność testu (DGP: deaminowane peptydy gliadyny) wynosi 98%.

Producent

DIATHER