


Dilatator doodbytniczy, 1 sztuka

Cena: 23,39 zł

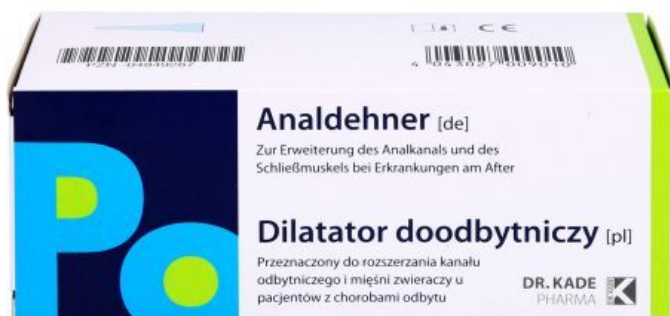

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DILATATOR
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	DR KADE PHARMAZEUT.FABRIK GMBH
Przeznaczenie	Hemoroidy
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Dilatator doodbytniczy jest zalecany do stosowania w terapii hemoroidów, w połączeniu z maścią przeznaczoną do leczenia dolegliwości hemoroidalnych. Produkt ten jest także używany do łagodnego rozszerzenia zwieraczy odbytu oraz poprawy elastyczności mięśni odbytu w przypadku chorób odbytnicy.

Wskazania

Dilatator doodbytniczy stosuje się w celu delikatnego rozszerzenia zwieraczy odbytu i kanału odbytniczego, a także poprawienia elastyczności mięśni odbytu w przebiegu chorób odbytu. W leczeniu choroby hemoroidalnej zaleca się używanie dilatatora w połączeniu z maścią stosowaną w leczeniu dolegliwości hemoroidalnych.

Działanie

Stosowanie dilatatora doodbytniczego doprowadza do rozluźnienia napiętych mięśni zwieraczy, poprawy krążenia krwi, a ponadto zapobiega skurczom zwieraczy odbytu.

Stosowanie

Zaleca się stosowanie dilatatora 2 razy dziennie przez około 2 minuty. Podczas używania należy wprowadzać dilatator powoli, kilkanaście razy z rzędu (10-15 razy). W przebiegu leczenia powinno się podejmować próby wprowadzania dilatatora stopniowo coraz głębiej do kanału odbytu. Sukces leczenia jest w głównej mierze uzależniony od regularnego używania dilatatora. Ponadto, jako dodatkowe ćwiczenie zaleca się wielokrotne aktywne zaciskanie mięśni zwieraczy na dilatatorze, co powoduje wzmocnienie zarówno mięśni zwieraczy, jak również słabych mięśni dna miednicy. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Po użyciu wytrzyj dilatator papierem toaletowym i umyj ciepłą wodą.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Producent

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
RigistraBe 2
12277 Berlin