

Domowe Laboratorium Amfetamina Strip test paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu 1 sztuka



Cena: 16,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Test paskowy
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Domowe Laboratorium, Test na obecność amfetaminy w moczu, STRIP, 1 szt. – wyrób medyczny umożliwiający samodzielne wykrywanie amfetaminy w próbce moczu.

Sposób użycia

- Wyjąć pasek testowy z opakowania foliowego trzymając za jego górną część.
- Pasek należy zanurzyć w próbce moczu przez 10-15 sekund.
- Umieścić pasek testowy na płaskiej powierzchni i obserwować pojawianie się prążków.
- Pod koniec 5 minuty należy odczytać wynik testu.
- Nie można odczytywać wyniku po upływie 8 minut.

Producent

Hydrex