

# Domowe Laboratorium Multi test narkotykowy z moczu



Cena: 29,14 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

## Opis produktu

### Wskazania

wynik już w 5 minut, wykrywa 6 narkotyków

### Stosowanie

Przed wykonaniem badania zapoznaj się ze szczegółową instrukcją dołączoną do testu!

1. Zbierz mocz do pojemnika i zanurz w nim test na 15 sek.
2. Odczekaj 5 minut i odczytaj wyniki
3. Wyniki ujemne: żadnego narkotyku nie wykryto w moczu
4. Wyniki dodatnie: wykryto wszystkie narkotyki w moczu

Zobacz jak wykonać test oraz interpretować wyniki na:  
[www.youtube.com/domowelaboratorium](http://www.youtube.com/domowelaboratorium)

### Przeciwwskazania

Przechowywać z dala od dzieci

### Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp.k.

### Opis

Domowe Laboratorium Multi test narkotykowy z moczu

## Galeria

