

Domowe Laboratorium, Owulacyjny LH Test, 5 sztuk



Cena: 11,91 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	5 sztuk
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Domowe Laboratorium Owulacyjny LH Test to jednorazowy pasek testowy do samodzielnego monitorowania owulacji. Test wykrywa nagły wzrost stężenia hormonu luteinizującego (LH) w moczu, który sygnalizuje nadchodzącą owulację. Wynik jest dostępny po upływie zaledwie 5 minut.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do domowej diagnostyki tzw. momentu nagłego skoku hormonu luteinizującego w moczu kobiety (już na poziomie 30 mIU/ml).

Sposób użycia

Skrócona instrukcja użycia:

- Zanim wykona się właściwy test należy wyznaczyć dzień, w którym będzie się odbywać. W tym celu należy skorzystać z tabeli umieszczonej w ulotce wyrobu.
- W dniu badania należy otworzyć foliową kopertę i wyjąć pasek testowy, trzymając jedynie za jego górną część i nie dotykając pozostałej części testu.
- Włożyć pasek testowy do wcześniej przygotowanej próbki moczu na odpowiednią głębokość (do tzw. linii MAX).
- Po upływie 10-15 sekund wyjąć pasek testowy z pojemnika i położyć go na poziomej powierzchni płaskiej.
- Monitorować przemieszczanie się próbki moczu przez strefę testową (T) oraz strefę kontrolną (C) na pasku testowym. Początek, aż pojawią się na nim barwne prążki. Wynik badania można odczytać po upływie 5 minut od momentu zanurzenia paska w próbce moczu.

Ostrzeżenia

- Wynik testu pojawia się na pasku już po 5-ciu minutach. Dłuższe zwlekanie z odczytaniem wyniku może zaburzyć wynik. Nie należy brać pod uwagę wyników odczytanych po 8 minutach od wykonania testu.
- Nie należy stosować do analizy pierwszego, porannego moczu.

- Na dwie godziny przed badaniem należy ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.
- Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub poradzić się farmaceuty.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Produkt jednorazowy. Nie używać ponownie.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.
Aleja Stanów Zjednoczonych 61a
04-028 Warszawa

Galeria

