

Domowe Laboratorium, Pink Super Czuły, płytkowy test ciążowy, 1 sztuka



Cena: 4,76 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Test ciążowy
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Płytkowy test ciążowy Pink Super Czuły to wyrób medyczny, który jest wygodny w użyciu do wykrywania hormonu hCG w moczu u kobiet w ciąży. Test cechuje się czułością 10 mIU/ml oraz dokładnością ponad 99,9%. Wynik jest widoczny po 1-5 minutach. Można go wykonać już 6 dni po zapłodnieniu, choć najlepszy czas na przeprowadzenie testu to dzień po spodziewanej miesiączce.

Wskazania

Pink Super Czuły jest testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Skład

Opakowanie zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania:

- 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 test płytkowy, 1 pipetka i 1 środek pochłaniający wilgoć,
- 1 instrukcję używania wyrobu.

Stosowanie

- Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny.
- Badanie mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.
- Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie.
- Z kopertki wyjmij test płytkowy i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.
- Płytkę testową umieść na poziomej powierzchni.
- Końcówkę plastikowej pipetki zanurz w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnij ją moczem.
- Odmierz powoli 3 pełne krople moczu do okrągłego okienka na płytce testowej.

- Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę trzymaj pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.
- Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu.
- Odczekaj, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.
- Dodatni wynik testu może pojawić się już po 1 minucie od wprowadzenia próbki moczu do okrągłego okienka na płytce testowej. Jednak dla potwierdzenia wyniku ujemnego należy odczekać 5 minut.
- Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

Przeciwwskazania

- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.

Producent

HYDREX

Galeria

