

Domowe Laboratorium Pink test ciążowy strumieniowy super czuły, 1 sztuka



Cena: 5,57 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Test ciążowy
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Test ciążowy **Pink Strumieniowy Super Czuły** to bardzo precyzyjne, jednorazowe badanie domowe, które jest szybkie i proste w użyciu.

Skład

1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 test strumieniowy i 1 środek pochłaniający wilgoć instrukcję wykonania testu

Stosowanie

-Tuż przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjmij test strumieniowy i zapoznaj się z jego budową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci.

- Zdejmij nasadkę i skieruj końcówkę testu pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund. Można również zebrać mocz do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na co najmniej 10 sekund samą końcówkę testu.
- Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałóż z powrotem nasadkę i umieść test na poziomej powierzchni tak, aby widoczne były obydwa okienka testu. Obserwuj przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekaj, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.
- Wynik testu odczytaj po czasie 1 do 4 minut od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu.
- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę.

Właściwości

Pink Strumieniowy Super Czuły jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Czułość testu Pink Strumieniowy Super Czuły została ustawiona na 10 mIU/ml.

Zasada działania testu ciążowego oparta jest na reakcji hormonu hCG znajdującego się w moczu kobiety w ciąży z monoklonalnymi przeciwciałami anti-hCG, które zostały naniesione na test.

Wykonanie badania testem Pink Strumieniowy Super Czuły jest bardzo proste, wystarczy końcówkę testu skierować pod strumień moczu, a wynik w postaci barwnych prążków w okienku wynikowym uzyskuje się w czasie 1-4 minut.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa

Galeria

