

Domowe Laboratorium Test na infekcje dróg moczowych dla dzieci + dorosłych 2 sztuki



Cena: 21,30 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DOMOWE LABORATORIUM
Opakowanie	2 sztuki
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	, Infekcja, PROBLEM
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Domowe Laboratorium Test na Infekcje Dróg Moczowych to jednorazowy test do użytku domowego, służący do wykrywania obecności azotynów i leukocytów w moczu. Ten wyrób medyczny pozwala na samodzielne przeprowadzenie testu w warunkach domowych, zarówno w celach wstępnej diagnostyki u osób dorosłych, jak i dzieci.

Infekcja dróg moczowych występuje, gdy w drogach moczowych pojawiają się drobnoustroje, najczęściej bakterie. W normalnych warunkach górne części dróg moczowych, powyżej zwieracza pęcherza moczowego, są wolne od mikroorganizmów. Jednak w niektórych sytuacjach może dojść do przedostawania się i namnażania drobnoustrojów, co prowadzi do stanów zapalnych. Objawy infekcji dróg moczowych mogą obejmować częste oddawanie moczu, pieczenie i ból podczas mikcji, silne uczucie parcia na pęcherz z jednoczesną trudnością w oddawaniu moczu lub wydalaniem niewielkich ilości, bóle w okolicy lędźwiowej, gorączkę, dreszcze, ale czasem infekcje mogą przebiegać bezobjawowo, nie wywołując wymienionych objawów.

Zastosowanie

Wykrywanie infekcji dróg moczowych w warunkach domowych poprzez oznaczanie poziomu azotynów i leukocytów w moczu.

Sposób użycia

- Wyjąć test z opakowania kopertowego.
- Test można wykonać na dwa sposoby:
- Poprzez umieszczenie końcówki testu z polami reakcyjnymi pod strumieniem moczu na 1-2 sekundy.
- Zanurzając pasek testowy w próbce moczu, który został zebrany do czystego i suchego pojemnika.
- Trzymając pasek testowy w pozycji poziomej należy dotknąć jego brzegiem do chusteczki higienicznej w celu usunięcia nadmiaru moczu.
- Korzystając ze skali barwnej umieszczonej na opakowaniu, należy porównać zabarwienie pól na teście.

Przeciwwskazania

- Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie należy używać testu przebarwionego, jeśli kolor testu może wskazywać na utratę wymaganych właściwości.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Uwagi

Próbka moczu wykorzystana do badania powinna pochodzić ze środkowego strumienia. Najkorzystniej, aby była pobrana rano, po nocnej (co najmniej 4-godzinnej) pauzie w oddawaniu moczu. Jeśli korzystamy z pojemnika na mocz, powinien być on czysty i suchy. Do badania powinno się przystąpić niezwłocznie po zebraniu próbki (maksymalnie w przeciągu 1 godziny od jej pobrania).

W przypadku kobiet nie należy pobierać moczu podczas okresu, jak również 2 - 3 dni przed spodziewaną miesiączką i tuż po jej zakończeniu.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tomasz Zana 4
04-313 Warszawa

Galeria

