

# Domowe Laboratorium Test na infekcje intymne pH test 2 sztuki



Cena: 15,17 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	DOMOWE LABORATORIUM
Opakowanie	2 sztuki
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Przeznaczenie	Infekcja
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Domowe Laboratorium pH Test** to produkt medyczny, umożliwiający przeprowadzenie samodzielnego testu pH pochwy w warunkach domowych. Jest to jednorazowy test, który stanowi nowoczesną metodę monitorowania zdrowia intymnego, ponieważ nieprawidłowe pH pochwy może być przyczyną różnych infekcji miejsc intymnych. Za pomocą tego testu można przeprowadzić profesjonalne badanie diagnostyczne środowiska pochwy, które powinno utrzymywać kwaśny odczyn w zakresie pH 3,8-4,4. Odpowiednie pH zapewni utrzymanie równowagi i zapobiega rozwojowi infekcji intymnych.

### Zastosowanie

- Ocena pH pochwy do wstępnej diagnostyki infekcji intymnych.
- Test pozwala na stwierdzenie, czy odczyn środowiska pochwy mieści się w zakresie 3,8-4,4 pH i wskazuje, czy jesteś narażona na infekcje okolic intymnych.
- Polecany pacjentkom z częstymi infekcjami miejsc intymnych, z nawracającym pieczeniem, swędzeniem oraz nieprzyjemnie pachnącymi upławami w miejscach intymnych.

### Sposób użycia

1. Dokładnie umyj ręce.
2. Wyjmij aplikator z folii.
3. Usiądź na muszli sedesowej z szeroko rozstawionymi kolanami lub stań w lekkim rozkroku.
4. Wolną ręką delikatnie rozszerz ujście pochwy, ostrożnie rozsuwając wargi sromowe.
5. Wprowadź aplikator do pochwy na głębokość około 2,5 cm, przyciskając polem testowym w kierunku odbytu.
6. Po upływie 10 sekund ostrożnie wyjmij produkt z pochwy.
7. Porównaj barwę na powierzchni testowej ze skalą pH umieszczoną na opakowaniu.

## Przeciwwskazania

- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.
- Nie stosować po upływie daty ważności.

## Uwagi

- Jeśli po przeprowadzeniu testu powierzchnia pomiarowa nie posiada jednolitego zabarwienia oznacza to, że test nie został wykonany prawidłowo. Możliwą przyczyną jest nieodpowiednie nawilżenie przez wydzielinę pochwy. W takim przypadku można poprawić nawilżenie używając tego samego aplikatora.
- Test umożliwia jedynie określenie poziomu pH, wynik ukazujący nieprawidłowe pH pochwy nie jest równoznaczny z występowaniem infekcji.
- Niewłaściwe stosowanie aplikatora może spowodować rozerwanie błony dziewiczej u kobiet, które nie rozpoczęły jeszcze życia seksualnego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Tomusza Zana 4  
04-313 Warszawa

## Galeria

