

Domowe Laboratorium Test Narkotykowy, domowy test do wykrywania narkotyków w ślinie, 1 sztuka



Cena: 40,34 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DOMOWE LABORATORIUM
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Test Narkotykowy ze Śliny **Domowe Laboratorium** to wyrób medyczny, który umożliwia wykrywanie narkotyków w ślinie. Produkt może potwierdzić obecność sześciu różnych substancji: morfiny, heroiny, amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy. Wyniki w postaci różowych prążków są uzyskiwane w ciągu 10 minut dla każdego narkotyku, a wiarygodność wyniku utrzymuje się do 20 minut. Zestaw zawiera płytkę testową, próbnik i pojemnik na próbkę. Aby przeprowadzić badanie, należy pobrać ślinę z ust za pomocą specjalnej gąbki w próbniku, wycisnąć ją do pojemnika z nakrętką dozującą, a następnie wprowadzić po 3 krople śliny do dwóch pól reakcyjnych na płytce testowej. Obecność morfiny, heroiny i kokainy można wykryć w ślinie przez 12-24 godziny od zażycia, amfetaminy przez 20-50 godzin, a marihuany i haszyszu przez około 14 godzin.

Ten nowoczesny test domowego użytku stanowi świetne narzędzie diagnostyczne, umożliwiając szybkie i wygodne sprawdzenie śliny dziecka lub bliskiej osoby pod kątem obecności nielegalnych substancji. Test narkotykowy ze śliny dostarcza informacji o obecności narkotyków, co jest pomocne w diagnozowaniu i monitorowaniu uzależnień oraz w działaniach terapeutycznych związanych z leczeniem tych uzależnień.

Zastosowanie

Jednorazowy domowy test do wykrywania narkotyków w ślinie.

Sposób użycia

- Test rozpocznij od pobrania śliny za pomocą specjalnego próbnika załączonego do zestawu.
- W tym celu włóż go do ust i energicznie pocieraj wewnątrz jamy ustnej przez ok. 3 minuty (gąbka powinna być równomiernie nasączona).
- Nasączony próbnik umieść w pojemniku i energicznie dociśnij, aby wycisnąć jak najwięcej śliny.
- Nałóż nakrętkę i odchyl dozownik do pionu.
- Energicznie ściśnij dozownik i zaaplikuj po trzy krople śliny do dwóch okienek umiejscowionych na froncie testu.
- Poczekać 10 minut i odczytaj wszystkie wyniki (interpretacja wyników po dłuższym czasie będzie nieprawidłowa i nie należy brać

jej pod uwagę).

Wynik dodatni:

- pojawienie się prążka w strefie kontrolnej C oznacza poprawne przeprowadzenie testu,
- brak odpowiednich oznaczeń w polach OPI, AMP, THC, COC sygnalizuje wykrycie wszystkich analizowanych substancji – opiatów, amfetaminy, marihuany/haszyszu oraz kokainy.

Wynik ujemny:

- Przy wszystkich polach pojawiły się barwne prążki,
- wynik oznacza brak stwierdzenia obecności analizowanych substancji w ślinie.

Wynik nieważny

- brak prążka w strefie kontrolnej C oznacza nieważny wynik testu,
- w takiej sytuacji badanie należy powtórzyć za pomocą nowego zestawu i innej próbki śliny.

Ważne wskazówki

- Test narkotykowy ze śliny jest testem do diagnostyki in vitro przeznaczonym do wykrywania obecności narkotyków w ślinie.
- Test dostarcza jedynie wstępne wyniki analityczne; w celu potwierdzenia wyników należy przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne, zaleca się metodę chromatografii gazowej i/lub spektrometrii masowej (GC/MS).

Producent

HYDREX