

Domowe Laboratorium THC Strip, domowy test paskowy do wykrywania kanabinoidów i metabolitów (THC) w moczu, 1 sztuka



Cena: 14,71 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Domowe Laboratorium THC Strip to paskowy test narkotykowy, który wykrywa obecność kanabinoidów i ich metabolitów (THC) w moczu. Test o czułości 50 ng/ml szybko identyfikuje THC, główny metabolit marihuany i haszyszu, w moczu osób, które używały tych substancji. Jego skuteczność wynosi ponad 99%.

THC, powstające w wątrobie jako produkt przemiany marihuany lub haszyszu, może być wykrywane w organizmie przez 5 do 20 dni. Test THC Strip jest prosty w użyciu i opiera się na detekcji kanabinoidów i ich metabolitów w moczu, gdzie wynik przedstawia się jako wyraźne barwne prążki.

Wykonanie testu jest łatwe, a wynik można uzyskać w ciągu 5 minut. Test THC Strip to efektywne narzędzie do monitorowania obecności narkotyków, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, co może wspierać rodziców w prewencji uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Zastosowanie

Jednorazowy domowy test narkotykowy paskowy do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC) w moczu.

Sposób użycia

- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie.
- Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część (z nadrukowaną nazwą testu), zwracając uwagę, aby nie dotknąć palcami pozostałej części testu (w kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić).
- Pasek testowy zanurzyć w badanym moczu powoli i tylko do głębokości zaznaczonej linią MAX.
- Po upływie 10-15 sekund należy wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni.
- Odczekać, aż pojawią się barwne (różowe) prążki.
- Wynik testu odczytać pod koniec 5-tej minuty od momentu zanurzenia paska testowego w moczu (nie brać pod uwagę wyniku



otrzymanego po czasie dłuższym niż 15 minut).

Wynik ujemny:

- w badanym moczu nie stwierdzono obecności narkotyków, gdy w polu testowym pojawiają się dwa barwne prążki – w strefie testowej T oraz w strefie kontrolnej C.

Wynik dodatni:

- jeden barwny prążek w strefie kontrolnej C oznacza pozytywny wynik potwierdzający obecność narkotyków w moczu badanego.

Wynik nieważny:

- brak reakcji lub samodzielne wystąpienie paska testowego T sygnalizuje nieważny wynik badania,
- cały proces należy powtórzyć z wykorzystaniem nowego zestawu diagnostycznego.

Ważne wskazówki

- Jeśli natychmiastowe przeprowadzenie badania nie jest możliwe, próbkę można przechować przez 48 godzin w temperaturze 2-8 °C (przed dokonaniem diagnozy należy doprowadzić mocz do temperatury pokojowej).
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji wykonania i czasu odczytu wyniku testu.
- Wyrób medyczny jednorazowego użytku do samokontroli.

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa