

Durex Extra Safe Thicker Prezerwatywy 18 sztuk



Cena: 69,58 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	DUREX
Opakowanie	18 sztuk
Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (POLAND) SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antykoncepcja
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Prezerwatywy **Durex Extra Safe Thicker** są nieco grubsze niż klasyczne prezerwatywy Durex Classic, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących dodatkowego zabezpieczenia.

Składniki

Naturalny lateks.

Zastosowanie

Prezerwatywy Durex są środkiem antykoncepcyjnym.

Sposób użycia

1. Delikatnie wyjmij prezerwatywę z opakowania.
2. Ściśnij zbiorniczek umieszczony na końcu, by usunąć z niego powietrze.
3. Rozwiń prezerwatywę na członku.
4. Po użyciu zdejmij i wyrzuć prezerwatywę.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie używaj jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występują stany zapalne lub uszkodzenie skóry.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Właściwości

Prezerwatywy Durex Extra Safe

- Gładkie.

- Kształt Easy-on.
- Wykonane z nieco grubszego lateksu.
- Prezerwatywy zostały pokryte większą ilością lubrykantu dla zapewnienia komfortu w czasie stosunku.
- Zakończone zbiorniczkiem.
- Standardowy rozmiar (szerokość nominalna równa 56 mm).

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Natychmiast przestań używać i wezwij lekarza, jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na lateks.
- Używaj prezerwatywy tylko raz. Nie używaj ponownie wykorzystanej prezerwatywy.

Producent

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS
Wielka Brytania

Galeria

