

Durex Intense Wyrób medyczny prezerwatywy 10 sztuk



Cena: 47,08 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	DUREX
Opakowanie	10 sztuk
Postać	DUREX
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Antykoncepcja
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Prezerwatywy **Durex Intense** z żelem stymulującym zostały stworzone w celu intensyfikacji doznań seksualnych dla obojga partnerów. Są przezroczyste, nawilżane, lateksowe, o fakturze prążkowanej z dodatkowymi wypustkami, pokryte specjalnym żelem stymulującym Desirex.

Składniki

Naturalny lateks.

Zastosowanie

Jako środek antykoncepcyjny lub zapobiegający zarażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Sposób użycia

1. Delikatnie wyjmij prezerwatywę z opakowania.
2. Ściśnij zbiorniczek umieszczony na końcu, by usunąć z niego powietrze.
3. Rozwiń prezerwatywę na członku.
4. Po użyciu zdejmij i wyrzuć prezerwatywę.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie używaj jeśli u Ciebie lub partnera(ki) występują stany zapalne lub uszkodzenie skóry.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Natychmiast przestań używać i wezwij lekarza, jeśli w trakcie używania wystąpią trudności w oddychaniu lub zasinienie ust.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na lateks.
- Używaj prezerwatywy tylko raz. Nie używaj ponownie wykorzystanej prezerwatywy.

Producent

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS
Wielka Brytania

Galeria

