

Ectifem, nawilżający żel dopochwowy, 30 ml

Cena: 38,67 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Opakowanie	30 ml
Postać	Żel
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ectifem żel to bezbarwny, półprzezroczysty żel nawilżający, który nie zawiera hormonów. Jest przeznaczony do łagodzenia suchości i atrofii pochwy. Zawiera ektoinę (Ectoin), naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje działanie przeciwzapalne i stabilizujące błony komórkowe. Żel nawilża suchą błonę śluzową pochwy, pomagając zmniejszyć objawy atrofii, takie jak suchość, swędzenie i pieczenie.

Składniki

Ektoina (Ectoin), woda, hydroksyetyloceluloza, kwas mlekowy, mleczan sodu, benzoesan sodu, glikol propylenowy.

Zastosowanie

- Ectifem żel jest zalecany do leczenia pierwszych objawów dyskomfortu pochwy.
- Ectifem żel może być stosowany razem z ogólnoustrojowymi terapiami hormonalnymi.

Sposób użycia

- Ectifem żel należy zawsze używać zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Ectifem żel należy aplikować raz dziennie, najlepiej wieczorem, co najmniej 1 godzinę przed snem (jeśli jest taka konieczność, należy użyć wkładek higienicznych).
- W razie potrzeby Ectifem żel może być używany rzadziej (z odstępem jednego / dwóch / trzech dni).

Przeciwwskazania

- Preparatu Ectifem żel nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę (Ectoin®), glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników żelu.
- Jeśli wystąpią reakcje alergiczne, należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Nie stosować w przypadku urazów lub operacji w okolicy pochwy.
- Nie stosować podczas infekcji sromu i pochwy.



- Nie ma dostępnych danych dotyczących interakcji między Ectifem żel a innymi produktami do stosowania dopochwowego. Dlatego nie zaleca się stosowania preparatu razem z tamponami i globulkami dopochwowymi.

Ostrzeżenia

- Ectifem żel nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.
- Ectifem żel nie jest środkiem plemnikobójczym ani nie wspomaga poczęcia. Nie ma działania antykoncepcyjnego i nie może być stosowany w celu zapobiegania ciąży.

Ważne wskazówki

- Ectifem żel jest kompatybilny z prezerwatywami z naturalnego lateksu, poliizoprenu i poliuretanu.
- Aby zapewnić higienę, produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosować dłużej niż 3 miesiące po otwarciu.
- Nie używać produktu uszkodzonego. Przed każdym zastosowaniem aplikator należy dokładnie sprawdzić pod kątem integralności.
- Nie używać aplikatora, jeśli jest uszkodzony (np. ma widoczne pęknięcia lub odpryski) lub jego tłok jest poluzowany i łatwo odłącza się od tuby.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn