

El-Comp, wymazówka z podłożem Amies, sterylna, z probówką

Cena: 3,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	EL-COMP CEZARY KOSTUCH
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

El-Comp wymazówka z podłożem Amies to wyrób medyczny służący do pobierania próbek z różnych miejsc, takich jak oczy, uszy, nosogardziel, gardło, układ moczowo-płciowy, piersi, odbytu oraz różnych wysięków, które następnie poddawane są analizie mikrobiologicznej.

Zestaw zawiera wymazówkę oraz probówkę z modyfikowanym podłożem Amies, które umożliwia zachowanie flory mikrobiologicznej obecnej w pobranej próbce podczas transportu. Skład podłoża jest tak dobrany, aby umożliwić przeżycie zarówno tlenowych, jak i beztlenowych mikroorganizmów, chociaż czas przeżycia beztlenowych bakterii jest z konieczności krótszy. Półstałe podłoże nie jest odżywcze, a obecność roztworu soli zapobiega nadmiernemu rozwojowi flory zanieczyszczającej, co ułatwia izolację patogenów.

Składniki

trioglikolan sodu 1 g/l, chlorek sodu 3 g/l, chlorek potasu 0,20 g/l, chlorek wapnia 0,10 g/l, chlorek magnezu 0,10 g/l, fosforan potasu jednozasadowy 0,20 g/l, fosforan potasu dwuzasadowy 1,15 g/l, agar 5 g/l.

Zastosowanie

Wymazówka do pobierania próbek do analizy mikrobiologicznej dotyczącej oczu, uszu, piersi, gardła i nosogardzieli, układu moczowo-płciowego, odbytu i różnych wysięków.

Sposób użycia

- Otwórz opakowanie, a następnie zdejmij zakrętkę z probówki.
- Wyjmij wymazówkę, trzymając ją za nasadkę, do której jest przymocowana i unikaj kontaktu wymazówki z powierzchniami innymi niż powierzchnia pobierania.
- Przeprowadź pobranie próbki.
- Wprowadź wymazówkę do probówki z podłożem transportowym i całkowicie nią w nim zanurz zgodnie z technikami mikrobiologicznymi i dobrą praktyką laboratoryjną.



- Upewnij się, że zakrętka z wymazówką jest prawidłowo włożona do probówki.
- Zapisz informację na etykiecie probówki i niezwłocznie prześlij do laboratorium.

Właściwości

- Sterylny (radiacyjnie) wyrób medyczny,
- Wymazówka z podłożem Amies,
- Do pobierania próbek do analizy mikrobiologicznej,
- Dodatkowo dołączona probówka,
- Jednorazowego użytku.

Ostrzeżenia

- Manipulowanie próbkami, zaszczerpienymi pożywkami i kulturami bakteryjnymi musi być wykonywane przez wykwalifikowany i odpowiednio wyposażony personel w zależności od ryzyka związanego z obsługą potencjalnie zakaźnych materiałów.
- Przed użyciem produkt należy uznać za nieszkodliwy. Po użyciu zestaw jest odpadem medycznym potencjalnie niebezpiecznym i zakaźnym.
- Nie używaj produktu, jeżeli jego opakowanie zostało uszkodzone.

Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny należy przechowywać w temperaturze od 5 do 25°C, bez dostępu do światła, do daty ważności wskazanej na każdym opakowaniu.
- Okres przydatności właściwie przechowywanego zestawu: 560 dni od daty produkcji.

Dodatkowe informacje

- Ilość pożywki obecnej w probówce wynosi około 4 ml.
- Wyrób medyczny wyprodukowany zgodnie z normą ISO 13485:2016.
- Produkt sterylny (radiacyjnie).

Producent

EL-COMP
ul. Warszawska 11
82-300 Elbląg