

Elgydium Clinic, nić dentystyczna z fluorem, orzeźwiająca mięta, 35 m



Cena: 18,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ELGYDIUM
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Nić
Producent	PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Kosmetyk
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fluorowana nić dentystyczna **Elgydium Clinic Cool Mint** delikatnie oczyszcza przestrzenie międzyzębowe i pomaga zapobiegać próchnicy. Ta nitka z fluorem jest idealna do czyszczenia ciasnych przestrzeni międzyzębowych oraz miejsc, do których nie dociera tradycyjna szczoteczka do zębów.

Zastosowanie

Nić dentystyczna z fluorem do codziennej pielęgnacji jamy ustnej.

Sposób użycia

- Odetnij 40 cm nici.
- Owiń ją wokół palców wskazujących.
- Użyj kciuków, aby delikatnie poprowadzić nić dentystyczną między zębami ruchem ścinającym.
- Umieść nić dentystyczną na powierzchni zęba i wykonaj ruch z góry na dół.
- Następnie umieść nić dentystyczną po drugiej stronie i powtórz ruch.
- Dla uzyskania efektów nitkuj zęby codziennie.

Ostrzeżenia


- Należy zachować ostrożność w czasie nitkowania.
- Nitkowanie zębów na siłę może stać się przyczyną uszkodzenia dziąseł.
- Nie należy połykać nici.

Ważne wskazówki

Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

Producent
PIERRE FABRE
Belwederska 20/22
Warszawa

Galeria

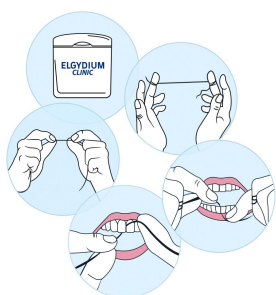

CHRONI PRZED
PRÓCHNICĄ ZĘBÓW
SKUTECZNIE CZYŚCI
PRZESTRZENIE
MIĘDZYZĘBOWE
USUWA PŁYTKĘ
BAKTERYJNĄ
ODŚWIEŻA ODDECH



MIĘTOWY SMAK
IMPREGNOWANA
FLUOREM
W CELU OCHRONY
PRZED PRÓCHNICĄ
PŁASKI KSZTAŁT
UMOŻLIWIA CZYSZCZENIE
CIAŚNYCH PRZESTRZENI
MIĘDZYZĘBOWYCH



ELGYDIUM
SENSITIVE
PASTA DO ZĘBÓW
ELGYDIUM CLINIC
150/100
SZCZOTECZKA
DO ZĘBÓW
ELGYDIUM CLINIC
NASACZONA FLUOREM
NIC DENTYSTYCZNA

