

Elgydium Dental Flos Nić dent.pęczniejąca

Cena: 13,70 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

Niść dentystyczna Elgydium Clinic Expanding wykorzystuje technologię Riser Floss, która umożliwia jej rozprężenie w kontakcie ze śliną. Dzięki temu, niść wypełnia przestrzeń międzyzębową, co pozwala na dokładniejsze usunięcie płytki bakteryjnej i zanieczyszczeń. Ta innowacyjna technologia Riser Floss obejmuje 276 przeplecionych włókien, które pęcznieją pod wpływem śliny. Dzięki temu niść staje się bardziej miękka i rozpręża się, co umożliwia skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Stosowanie niści dentystycznej Elgydium Clinic Expanding może pomóc w usunięciu trudno dostępnej płytki bakteryjnej, co przyczynia się do utrzymania zdrowia dziąseł i zapobiegania próchnicy. Pamiętaj, aby stosować niść zgodnie z instrukcjami producenta i regularnie włączać jej używanie do codziennej rutyny higieny jamy ustnej.

Sposób użycia

Utnij 30 cm nici. Owiń wokół palca wskazującego. Delikatnie przeprowadzaj niść między zębami za pomocą kciuków ruchami skierowanymi do przodu i do tyłu. Przyłóż niść do powierzchni zęba i przesuwaj ją w dół. Następnie umieść niść w innej przestrzeni międzyzębowej i powtórz czynność.