

Emofix, hemostatyczna maść ochronna, 30 g

Cena: 45,85 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EMOFIX
Opakowanie	30 g
Postać	Maść
Producent	VITAMED
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Emofix to medyczna maść zapobiegająca i powstrzymująca krwawienie ze skóry i błon śluzowych.

Wskazania

Wyrób wskazany do stosowania w przypadku krwotoków z nosa (wywołanych samoistnie lub będących wynikiem urazu), a także krwawień z drobnych ran.

Skład

Mieszanka nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży, fosfatydylocholina, octan tokoferylu, воск pszczele, olej sojowy, alkohol stearylowy, chlorki wapnia, potasu i magnezu, monostearnian glicerolu, p-hydroksybenzoesan metylu i propylu, BHT.

Sposób użycia

Hamowanie krwawienia:

- Pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce.

Zapobieganie nawrotom krwawienia:

- Stosować maść dwa razy dziennie, przez co najmniej dwa tygodnie po ostrym epizodzie krwawienia lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku stosowania na błonę śluzową nosa zaleca się użycie aplikatora dołączonego do opakowania. Po każdym użyciu oczyścić aplikator. Ze względów higienicznych zaleca się używanie aplikatora przez jedną osobę

Uwagi

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

DMG Italia srl
via Laurentina Km 26,700
000 71 Pomezia (Rzym), Włochy
kontakt@vitamed.pl