

EvoTears krople do oczu 3 ml



Cena: 71,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EVOTEARS
Opakowanie	3 ml
Postać	Krople
Producent	URSAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Pieczenie, Podrażnienie, suchość, Zaczerwienienie, Zmęczenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

EvoTears to innowacyjne krople do oczu, wolne od wody, środków konserwujących i fosforanów. Ich jedynym składnikiem jest oktan perfluoroheksylu (F6H8), który tworzy trwałą warstwę lipidową na filmie łzowym. Ta warstwa utrzymuje się długo, zapewniając skuteczne łagodzenie utrzymujących się lub nasilonych objawów oraz ochronę oka przed podrażnieniami. EvoTears są dobrze tolerowane, ponieważ nie zawierają środków konserwujących. Dodatkowo, brak fosforanów w składzie kropli pomaga uniknąć potencjalnych powikłań związanych z osadem nierozpuszczalnym na powierzchni rogówki.

Składniki

Oktan perfluoroheksylu (EyeSol).

Zastosowanie

Do nawilżania suchych, podrażnionych oczu, stabilizacja filmu łzowego, redukuje objawy występujące przy suchości oka.

Sposób użycia

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy 4 x dziennie zakropić 1 kroplę preparatu, kierując ją na dolną powiekę. Preparat EvoTears nie zawiera środków konserwujących, dlatego dozwolone jest jego codzienne stosowanie.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować, jeśli u użytkownika stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na zawarty w preparacie oktan perfluoroheksylu.

Ostrzeżenia



- Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania EvoTears, jeżeli użytkownik stosuje równocześnie dodatkowo inne leki do oczu. Jeśli są one używane, należy odczekać co najmniej 30 minut przed i po aplikacji EvoTears. Krople EvoTears powinny być zawsze zakraplane jako ostatnie.
- Maści oczne nie powinny być stosowane w trakcie leczenia kroplami EvoTears.
- Preparat EvoTears nie jest przeznaczony dla osób noszących soczewki kontaktowe ze względu na brak wystarczających danych dotyczących tolerancji produktu przez materiały, z których wykonywane są soczewki.

Producent

NOVALIQ
Im Neuenheimer Feld 515, Niemcy
Heidelberg