

Excilor, na brodawki i kurczaki 2w1, 1 zestaw



Cena: 56,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 opakowanie
Postać	sztuft
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Excilor to medyczny produkt przeznaczony do użytku domowego, wspomagający usuwanie kurczaków i brodawek. Jego działanie opiera się na synergii dwóch sprawdzonych metod terapeutycznych: zastosowaniu kwasów oraz leczeniu zimnem (krioterapia). Cały cykl leczenia trwa zaledwie 5 dni, co czyni go szybkim i wygodnym rozwiązaniem.

Działanie

Wyrób medyczny Excilor 2w1 łączy w sobie dwie najpopularniejsze metody wspomagania leczenia tych dwóch dermatologicznych przypadłości – terapię kwasową oraz krioterapię. Działa zarówno od wewnątrz (poprzez zamrażanie) jak i od zewnątrz (działanie kwasem). Za pomocą szybkiego zamrożenia (-45°C) korzenia brodawki i złuszczenie zainfekowanej skóry, pogrubiona warstwa skóry brodawki oraz wirus ją wywołujący są usuwane, a w to miejsce pojawia się zdrowa, odnowiona skóra.

Skład

Substancja zamrażająca, TCA-Active™ (na bazie kwasu trichlorooctowego), Carbopol, Woda.

Stosowanie

- Dorośli: Krioterapia 1 x dziennie pierwszego dnia. Następnie terapia kwasowa 2 x dziennie przez kolejne 4 dni.
- Dzieci 4-12 lat: Krioterapia 1 x dziennie pierwszego dnia. Następnie terapia kwasowa 1 x dziennie przez kolejne 4 dni.

Przeznaczenie

Do samodzielnego usuwania brodawek i kurczaków.

Ostrzeżenia

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki lub informacją znajdującą się na opakowaniu wyrobu.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem wyrobu powinny skonsultować się z lekarzem.
- Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu żelu z oczami lub błonami śluzowymi przepłukać dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy medycznej.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Nie połykać ani nie wdychać substancji zamrażającej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Substancja zamrażająca jest łatwopalna i może powodować odmrożenia zdrowej skóry.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Uwagi

- Przed rozpoczęciem stosowania wyrobu przy wielu brodawkach, przy pierwszym zastosowaniu produktu, należy rozpocząć stosowanie produktu tylko na jednej z nich w celu sprawdzenia efektu działania na skórze.
- Aplikację na kolejnej brodawki można rozpocząć tylko, jeśli nie wystąpią żadne skutki uboczne (zazwyczaj w ciągu 5 dni).
- Jeśli kilka brodawek występuje w niewielkiej odległości od siebie wynoszącej ok. 1 cm, przed rozpoczęciem aplikacji na kolejne brodawki należy odczekać, aż skóra powróci do normalnego stanu (może to potrwać do 6 tygodni).
- Jeśli brodawka nie zniknie całkowicie, stosowanie preparatu można powtórzyć maksymalnie 3 razy.

Producent

MEDICAL BRANDS
Piet Heinkade 199
Amsterdam, Holandia