

# Fittydent, klej do protez, 40 g

Cena: 45,66 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                       |
| Opakowanie      | 40 g                                           |
| Postać          | Klej do protez                                 |
| Producent       | BAŁTYCKI INSTYTUT STOMATOLOGII SP. Z O.O. S.K. |
| Przeznaczenie   | Wspomagające                                   |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny                                 |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów                    |

## Opis produktu

### Opis

Preparat do stabilizacji protez zębowych.

### Działanie

Fittydent to jedyny wodoodporny klej do protez. Już po jednokrotnym nałożeniu tworzy pewne połączenie między protezą a dziąsłem. Dzięki opatentowanej, nierozpuszczalnej w wodzie formule nie musimy się już więcej obawiać o zsuwanie się lub przemieszczanie protezy nawet przez kilkanaście godzin!

### Skład

Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Alcohol, Triacetin, Paraffinum Liquidum, Silica.

### Sposób użycia

1. Zanim zastosujesz klej do protez fittydent dokładnie umyj i osusz swoje protezy zębowe. Klej fittydent zadziała w stu procentach tylko jeśli zostanie nałożony na całkowicie osuszone protezy.
2. Powoli wyciskając klej z tubki nałóż go na protezy. Aby klej łatwo wydostał się z tubki, ogrzej ją w dłoniach.
3. Nałóż klej na protezy pasmami, upewniając się, że nie znajdzie się on zbyt blisko ich zewnętrznych krawędzi.
4. Natychmiast po użyciu zakręć dokładnie tubkę zapobiegając jej zatykaniu.
5. Włóż protezę do ust i mocno przygryź.
6. W celu uzyskania najlepszego rezultatu, odczekaj 15 | minut zanim zaczniesz jeść lub pić.

### Ostrzeżenia

Nie stosować kleju do protez fittydent z innymi produktami klejącymi. Nie stosować na protezach z miękką wyściółką. Należy regularnie konsultować się z dentystą w celu sprawdzenia dopasowania protezy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Otwarcie tubki jest technicznie konieczne. Utylizacja opakowania, opakowania produktu i wkładki zgodnie z lokalnymi przepisami i zgodnie z symbolem recyklingu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej! W rzadkich przypadkach (lub w przypadku wrażliwych dziąseł) może wystąpić krótkotrwałe mrowienie i pieczenie spowodowane alkoholem zawartym w kleju. W takim przypadku zalecamy wydłużenie czasu przed wprowadzeniem o co najmniej pół minuty, aby alkohol zdążył odparować. Wodoodporny, bez cynku,



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

bez glutenu, wegański, bez testów na zwierzętach - certyfikat PETA. Efekty uboczne: Jak dotąd brak incydentów. Jednak w przypadku nietolerancji / nadwrażliwości na jeden ze składników należy przerwać stosowanie. W przypadku pojawienia się, bardzo rzadko, poważnego problemu po użyciu, należy skontaktować się z lekarzem. Wszelkie poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi i właściwym organom.

**Producent**

FITTYDENT INTERNATIONAL GmbH  
Carlberggasse 38/3/1  
1230 Vienna