

Fixopore F, opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 5 x 7,2 cm, 50 sztuk



Cena: 34,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przeznaczenie	Ochronne, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Jałowy opatrunek FIXOPORE F dzięki podłożu z folii poliuretanowej wspomaga proces gojenia ran. Specjalna struktura folii umożliwia odprowadzanie pary wodnej, jednocześnie skutecznie chroniąc ranę przed dostępem wody.

Działanie

Opatrunek chłonie i utrzymuje wydzieliny. Warstwa przylegająca do rany jest gładka i nie przykleja się do powierzchni rany lub szwu. Użyty klej jest hypoalergiczny. Nie pozostawia śladów na ciele pacjenta po usunięciu opatrunku. Opatrunek dopasowuje się nawet do trudnodostępnych części ciała. Nie ogranicza ruchów pacjenta.

Skład

Opatrunek skonstruowany jest z:

- wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową
- elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem
- papieru chłonnego

Sposób użycia

1. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę.
2. Następnie należy usunąć papier ochronny i założyć opatrunek, wygładzając równocześnie jego powierzchnię. Nie należy napinać opatrunku podczas zakładania na ranę.
3. Nie należy dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji opatrunku.
4. Fixopore S należy zakładać na oczyszczoną i osuszoną skórę i zmieniać tak często jak to jest konieczne.

Przeciwwskazania



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Producent
TZMO