

Fixopore S, 8 x 15 cm, opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, 50 opatrunków



Cena: 122,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Fixopore S to sterylny opatrunek przeznaczony do ochrony ran pooperacyjnych, również tych z obecnym wysiękiem. Dzięki zastosowaniu łagodnego kleju może być bezpiecznie używany na wrażliwych partiach ciała, nie powodując dyskomfortu ani nie ograniczając swobody ruchów pacjenta.

Wskazania

Plaster pooperacyjny może być stosowany na rany średniej wielkości, również te sączące. Przeznaczony jest do opatrywania ran po zabiegach chirurgicznych oraz w przypadku mniejszych skaleczeń i otarć.

Działanie

- Podłoże plastra wykonane zostało z białej, elastycznej włókniny, która sprawia, że Fixopore S łatwo dopasowuje się nawet do trudno dostępnych części ciała pacjenta i nie ogranicza jego ruchów.
- Zastosowana włóknina jest porowata, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać.
- Centralnie położony wkład chłonny posiada wysokie właściwości absorpcyjne, a jego zewnętrzna warstwa zabezpieczona jest mikrosiateczką, która zapobiega przywieraniu opatrunku do powierzchni rany i szwów.
- Zastosowany klej akrylowy redukuje ryzyko wystąpienia podrażnień. Po usunięciu opatrunku nie pozostawia śladów na ciele pacjenta.
- Zaokrąglone krawędzie opatrunku niwelują możliwość odklejania się brzegów. Szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwia łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach.

Skład

Opatrunek skonstruowany jest z:



- wkładu chłonnego pokrytego mikroperforowaną folią polietylenową
- elastycznego, poliestrowego przylepca pokrytego klejem
- papieru chłonnego

Sposób użycia

1. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę.
2. Następnie należy usunąć papier ochronny i założyć opatrunek, wygładzając równocześnie jego powierzchnię. Nie należy napinać opatrunku podczas zakładania na ranę.
3. Nie należy dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji opatrunku.
4. Fixopore S należy zakładać na oczyszczoną i osuszoną skórę i zmieniać tak często jak to jest konieczne.

Przeciwwskazania

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

Wyrób jednorazowego użytku. Nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie wyrobu wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zakażenia pacjenta i jest niedopuszczalne.

Producent

TZMO