

Fixsin Junior, zestaw do płukania nosa i zatok, 1 butelka, 120 ml + 30 saszetek



Cena: 34,02 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 zestaw
Postać	Zestaw
Producent	SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.
Przeznaczenie	Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fixsin Junior to medyczny zestaw przeznaczony do oczyszczania nosa i zatok, zawierający jedną butelkę oraz 30 saszetek z proszkiem do rozpuszczenia. Produkt wspomaga higienę dróg oddechowych i może być stosowany u dzieci.

Wskazania

Fixsin Junior, zestaw do płukania nosa i zatok poleca się stosować w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:

- zapalenia zatok przynosowych
- nieżyty nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- dla utrzymania higieny nosa i zatok

Dawkowanie

- Udrażnia oraz oczyszcza nos i zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu,
- Ogranicza gromadzenie się czynników przyczyniających się do rozwoju infekcji

Skład

100% chlorek sodu Ph.Eur.

Sposób użycia

- Płukanie przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza.



- Jedna saszetka w połączeniu z odpowiednią ilością wody (zgodnie z pojemnością butelki wybranego zestawu) tworzy gotowy roztwór do płukania nosa i zatok.
- Do płukania nie używać wrzątku ani gorącej wody. Nie używać nieprzegotowanej wody z kranu.

Ostrzeżenia

- Zestawu nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha.
- Po odbytej operacji ucha przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temp. poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej na godzinę przed snem.

Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania należy sprawdzić temperaturę wody.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części zestawu.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
biuro@solinea.pl