

Fixsin, zestaw do płukania nosa, zatok, 1 butelka (240 ml) + 15 saszetek

Cena: 30,21 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | FIXSIN |
| Opakowanie | 1 zestaw |
| Postać | , Proszek |
| Producent | SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. |
| Przeznaczenie | Infekcja, Katar, Zapalenie |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat |

Opis produktu

Opis

Fixsin to produkt medyczny, który zawiera butelkę o pojemności 240 ml oraz 15 saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu. Jego substancją czynną jest chlorek sodu. Zestaw ten został stworzony w celu udrażniania i oczyszczania nosa i zatok z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, co pomaga ograniczyć gromadzenie się czynników sprzyjających infekcjom. Fixsin jest przeznaczony do użytku domowego i może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 4 roku życia. Irygacja nosa przy użyciu zestawu Fixsin może być stosowana zarówno w celach prewencyjnych, jak i objawowych, w przypadku nieżyty nosa lub stanów zapalnych zatok.

Składniki

100% chlorek sodu.

Zastosowanie

Do stosowania u dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych w celu prewencyjnej, objawowej lub pooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok, głównie w przypadku:

- zapalenia zatok przynosowych,
- nieżyty nosa różnego pochodzenia,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- dla utrzymania higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

- Płukanie przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza.

- Jedna saszetka w połączeniu z odpowiednią ilością wody (zgodnie z pojemnością butelki wybranego zestawu) tworzy gotowy roztwór do płukania nosa i zatok.
- Do płukania nie używać wrzątku ani gorącej wody. Nie używać nieprzegotowanej wody z kranu.

Ostrzeżenia

- Wyrobu medycznego Fixsin nie powinny stosować osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha.
- Osoby, które miały operację ucha, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu Fixsin.
- Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata, przed użyciem Fixsin należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy stosować Fixsin w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.

Ważne wskazówki

- Nie stosować zestawu w przypadku całkowicie zablokowanej przegrody nosowej lub obecności infekcji ucha. W takich sytuacjach zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.
- Po odbytej operacji nosa i zatok przed rozpoczęciem stosowania zestawu należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz będzie mógł określić odpowiedni czas i sposób użytkowania zestawu w kontekście konkretnego zabiegu chirurgicznego.
- Nie stosować zestawu w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu, który jest substancją czynną w produkcie. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Ważne jest, aby nie używać wrzątku ani gorącej wody do sporządzania roztworu do płukania nosa i zatok. Należy używać wody o temperaturze pokojowej lub przegotowanej wody, która została ostudzona do odpowiedniej temperatury.
- Nie należy używać nieprzegotowanej wody z kranu do płukania nosa i zatok. Woda powinna być przegotowana lub poddana odpowiedniemu procesowi dezynfekcji, aby uniknąć możliwości zakażenia.