

Fixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 30 saszetek

Cena: 28,25 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Proszek
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fixsin to medyczny zestaw uzupełniający zawierający 30 saszetek, przeznaczony do sporządzania roztworu izotonicznego wykorzystywanego w płukaniu nosa i zatok. Produkt odpowiedni jest dla dorosłych oraz dzieci od 4. roku życia, wspomagając higienę i oczyszczanie dróg oddechowych.

Wskazania

Wyrób medyczny Fixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok:

- Jest polecany dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia, do profilaktycznej, objawowej lub pozabiegowej pielęgnacji nosa i zatok,
- Przy zapaleniu zatok przynosowych,
- Przy nieżytach nosa o różnym podłożu,
- Przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- Jako element utrzymania higieny nosa.

Działanie

Wyrób medyczny Fixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok:

- Zawiera czysty chlorek sodu (sól), do sporządzania roztworu do płukania nosa i zatok.
- Roztwór, używany z butelką z zestawu Fixsin, pomaga wypłukać i oczyścić nos i zatoki z wydzieliny, ograniczając zaleganie śluzu i czynników mogących przyczyniać się do powstania infekcji.

Skład



- 100% chlorek sodu.
- Każda saszetka zawiera 2,15 g chlorku sodu.

Sposób użycia

- Należy używać wyłącznie oryginalnych, czystych elementów zestawu Fixsin.
- Wsyp zawartość saszetki (2,15 g proszku) do butelki.
- Napełnij butelkę przegotowaną wodą o temperaturze ciała, do poziomu oznaczonego linią 240 ml. W ten sposób otrzymasz roztwór izotoniczny.
- Dokładnie zakręć butelkę i potrząśnij, aż do całkowitego rozpuszczenia soli w wodzie.
- Przyłóż końcówkę butelki do otworu nosowego. Oddychaj przez usta!
- Płynnym ruchem ściśnij butelkę tak, aby roztwór ciągłym strumieniem dostał się do nosa i wypłynął drugim nozdrzem.
- Czynności powtórz przy drugim nozdrzu.
- Nie połykaj roztworu.
- Po zakończeniu płukania wydmuchaj nos.
- Wylej roztwór, który pozostał w butelce.
- Po każdym użyciu należy dokładnie umyć butelkę i nakrętkę.
- Wszystkie elementy zestawu przechowuj czyste i suche.

Przeciwwskazania

Nie używaj zestawu Fixsin:

- U osób z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową.
- U osób z infekcją ucha.
- Po operacji ucha (należy skonsultować się z lekarzem).
- W przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
- Po upływie daty ważności.
- W przypadku uszkodzenia którejkolwiek części zestawu.
- Nie używaj do płukania gorącej wody ani wrzątku! Grozi to poparzeniem.
- Do sporządzania roztworu nie używaj nieprzegotowanej wody z kranu.

Uwagi

- Przechowywać suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn