

FLAEM Ghibli Plus Inhalator pneumatyczno-tłokowy certyfikowany

Cena: 215,56 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Inhalator
Producent	NOVAMED SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Flaem Ghibli Plus to inhalator pneumatyczny stworzony z myślą o terapii aerozolowej w leczeniu schorzeń układu oddechowego. Ten nowoczesny i wygodny inhalator tłokowo-pneumatyczny oferuje dwa tryby działania. Podczas terapii dolnych dróg oddechowych generuje cząsteczki o niewielkich rozmiarach, natomiast w przypadku leczenia gardła i krtani umożliwia uzyskanie cząsteczek nieco większych.

Zastosowanie

- Terapie aerozolowe w infekcjach dolnych dróg oddechowych.
- Urządzenie do stosowania przez dorosłych i dzieci.

Sposób użycia

- Przed każdym użyciem należy dokładnie umyć ręce i wyczyścić głowicę RF6 Basic2 oraz wszystkie akcesoria, zgodnie z instrukcją.
- Włożyć przewód zasilający do gniazdka.
- Otworzyć głowicę rozpylającą obracając górną część w stronę przeciwną do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Do dolnej części głowicy rozpylającej wlać produkt leczniczy zalecony przez lekarza.
- Zamknąć głowicę poprzez nałożenie górnej części i obrócenie jej zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Połączyć akcesoria (kapsleki umożliwiają podawanie aerozolu w dwóch trybach: standardowym, dla optymalnego dawkowania i dużej oszczędności leku oraz szybkim, dla szybszego rozpylenia dawki leku).
- Usiąść wygodnie trzymając nebulizator (głowicę) w ręku, umieścić ustnik w ustach lub przyłożyć maskę do twarzy.
- Uruchomić sprężarkę poprzez wciśnięcie włącznika sieciowego.
- Wykonywać spokojne, głębokie wdechy (zaleca się krótki wstrzymanie oddechu dla lepszej depozycji leku), a następnie wykonać

powolny wydech.

- Po zakończonym zabiegu wyłączyć sprężarkę przyciskiem i odłączyć ją od sieci zasilającej.
- Oczyszczyć głowicę rozpylającą i wykorzystane akcesoria zgodnie z instrukcją.
- Jeżeli w trakcie inhalacji na ściankach wewnętrznych przewodu powietrza osadziła się wilgoć, należy wydmuchać ją, wykorzystując sprężone powietrze.

Ostrzeżenia

- Przed pierwszym zabiegiem inhalacji należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.
- W komorze nebulizatora należy umieszczać leki przypisane bezpośrednio przed lekarza.
- Do inhalacji nie należy stosować produktów leczniczych bez konsultacji z lekarzem.
- Zaleca się wymianę nebulizatora RF6 Basic2 co najmniej co pół roku.
- Regularna wymiana nebulizatora inhalatora gwarantuje odpowiedni poziom higieny i maksymalną skuteczność terapeutyczną.
- Inhalator wyposażony jest w filtr, który należy wymieniać, gdy stwierdzone zostanie jego zabrudzenie lub zmiana koloru.
- Filtru nie należy czyścić we własnym zakresie (część jednorazowa podlegająca całkowitej wymianie po zużyciu).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania olejków eterycznych, produktów na bazie olejów, płynów zawierających tłuste lub zawieszone cząsteczki.

Producent

Flaem Nuova S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S.Martino delta Battaglia, Włochy