

Florakcid HA 10 mg, globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym, 10 globulek

Cena: 63,88 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	FLORAKCID
Opakowanie	10 globulek
Postać	Globulki
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające, Regenerujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Florakcid HA 10 mg to globulki dopochwowe, stanowiące wyrób medyczny, który skutecznie wspiera optymalne nawilżenie nabłonka pochwy.

Wskazania

Wyrób wskazany jest do stosowania w celu łagodzenia objawów i dolegliwości takich jak: świąd, zaczerwienienie, obrzęk, upławy, a także w celu nawilżenia śluzówki w stanach suchości pochwy związanych z menopauzą, okresem postmenopauzalnym, stosowaniem środków antykoncepcyjnych lub zastępczej terapii hormonalnej oraz w stanach atrofii i dystrofii nabłonka. Globulki mogą być także stosowane wspomagająco podczas procesu gojenia się śluzówki (np. po porodzie, zabiegach chirurgicznych, czy ginekologicznych), a także w celu łagodzenia dyskomfortu podczas bolesnych stosunków płciowych.

Działanie

Po wprowadzeniu do pochwy globulki Florakcid HA 10 mg ulegają roztopieniu, a zawarty w nich kwas hialuronowy pod wpływem kontaktu z naturalną wydzieliną pochwy pęcznieje i tworzy żelową powłokę na powierzchni nabłonka. Wytworzony film ochronny zabezpiecza śluzówkę, przywraca jej naturalną wilgotność oraz wspiera procesy regeneracyjne, dzięki czemu łagodzi stany zapalne i przyspiesza gojenie się uszkodzeń.

Skład

1 globulka zawiera 10 mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej oraz tłuszcz obojętny, jako substancję pomocniczą.

Stosowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej stosować jedną globulkę przed snem, nieprzerwanie przez 10-20 dni.

Przeznaczenie



Produkt przeznaczony jest do stosowania przez kobiety, u których występują stany suchości pochwy.

Sposób użycia

1. Dokładnie umyj i osusz dłonie.
2. Oderwij z blistra jedno gniazdo, i powoli oddziel od siebie zabezpieczające globulkę folie.
3. Znajdując się w pozycji leżącej, z lekko uniesionymi w górę udami palcem wepchnij globulkę głęboko do pochwy.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować w trakcie menstruacji.
- Nie stosować w inny sposób niż dopochwowo, nie połykać.
- W pojedynczej kuracji nie stosować dłużej niż 30 dni.
- Ze względu na ryzyko interakcji, w trakcie kuracji nie należy stosować lateksowych prezerwatyw.

Uwagi

- Przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródłami ciepła.
- W przypadku wystąpienia wyprysku, obrzęku, nasilenia się wcześniejszych dolegliwości lub pojawienia się nowych należy zaprzestać stosowania i zgłosić się do lekarza.
- W przypadku załagodzenia dolegliwości i w krótkim czasie ich ponownego wystąpienia nie należy wznawiać kuracji, tylko skontaktować się z lekarzem.
- Produkt może pozostawiać na bieliźnie trudne do usunięcia plamy, dlatego zaleca się korzystanie z wkładek higienicznych podczas kuracji.

Producent

Biofaktor Sp. z o.o.
Czysta 4
96-101 Skierniewice
info@biofaktor.pl