

Fluicondrial M 40 mg/ 2 ml, roztwór do iniekcji, 2 ml x 1 ampułkostrzykawka

Cena: 455,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLUICONDRIAL M
Opakowanie	1 ampułkostrzykawka, 2ml
Postać	Roztwór
Producent	REGIS
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fluicondrial M to rozwiązanie w postaci wyrębu medycznego, medycznego do iniekcji dostawczych w celu poprawy lepkości mazi stawowej. Jest to rozwiązanie w leczeniu bólu oraz ograniczenie ruchu chorobowego, urazów lub osteoartrozy. Mają swoje właściwości poślizgowe i lepkosprężystym, Fluicondrial M korzystnie wpływają na przywrócenie prawidłowej struktury stawów w przypadku wystąpienia lub urazów.

Składniki

Hialuronian sodu 20 mg/ml, chlorek sodu, diwodorofosforan sodowy dihydrat, disodu fosforan dodecahydrat, woda klasy WFI.

Zastosowanie

Fluicondrial M stosuje się w celu zredukowania bólu i ograniczenia ruchomości stawów będących skutkiem osteoartrozy lub urazów.

Sposób użycia

- Zaleca się wykonanie cyklu wstępnego od 4 do 5 zabiegów w odstępie nie mniejszym niż jeden tydzień.
- Następnie w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów zgodnie z zaleceniami lekarza można wykonać sesje podtrzymujące.

Przeciwwskazania

- Nie zalecane stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie stosować u pacjentów poniżej 18. roku życia.
- Preparat nie może być wstrzykiwany do stawu zakażonego lub z poważnym stanem zapalnym.



Ważne wskazówki

- Przechowywać w temperaturze 2-25°C w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem, ciepłem i mrozem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem należy sprawdzić integralność strzykawki i datę ważności.
- Preparat jednorazowego użytku.
- Jakość i sterylność są gwarantowane tylko wtedy, gdy strzykawka jest szczelnie opakowana.
- Wszelkie pozostałości należy wyrzucić i nie używać ponownie nawet po ponownej sterylizacji.
- Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest już otwarte lub uszkodzone.
- Po użyciu strzykawkę należy wyrzucić.

Producent

The WAVE Via G.
Barucchi 47A - 37139 Verona