

Fluicondrial M 80 mg/ 4 ml, roztwór do iniekcji, 4 ml x 1 ampułkostrzykawka

Cena: 1 352,46 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FLUICONDRIAL M
Opakowanie	1 ampułkostrzykawka po 4 ml
Postać	Roztwór
Producent	REGIS
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fluicondrial M to rozwiązanie w postaci wyrębu medycznego, medycznego do iniekcji dostawczych w celu poprawy lepkości mazi stawowej. Jest to rozwiązanie w leczeniu bólu oraz ograniczenie ruchu chorobowego, urazów lub osteoartrozy. Mają swoje właściwości poślizgowe i lepkosprężystym, Fluicondrial M korzystnie wpływają na przywrócenie prawidłowej struktury stawów w przypadku wystąpienia lub urazów.

Składniki

Hialuronian sodu 20 mg/ml, chlorek sodu, diwodorofosforan sodowy dihydrat, disodu fosforan dodecahydrat, woda klasy WFI.

Zastosowanie

Fluicondrial M jest przeznaczony do stosowania przy chorobach zwyrodnieniowych, bólu i ograniczeniach ruchomości stawów wynikających z urazów.

Sposób użycia

- Zaleca się wykonanie cyklu wstępnego od 1 do 2 zabiegów w minimum tygodniowych odstępach.
- Następnie zgodnie z zaleceniami lekarza ewentualnie kolejne sesje podtrzymujące.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
- Nie stosować u pacjentów poniżej 18. roku życia.
- Nie wstrzykiwać preparatu do stawu zakażonego lub z poważnym stanem zapalnym.



Ważne wskazówki

- Przechowywać w temperaturze 2-25°C w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem, ciepłem i mrozem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem należy sprawdzić integralność strzykawki i datę ważności.
- Preparat jednorazowego użytku.
- Jakość i sterylność są gwarantowane tylko wtedy, gdy strzykawka jest szczelnie opakowana.
- Wszelkie pozostałości należy wyrzucić i nie używać ponownie nawet po ponownej sterylizacji.
- Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest już otwarte lub uszkodzone.
- Po użyciu strzykawkę należy wyrzucić.

Producent

The WAVE Via G.
Barucchi 47A - 37139 Verona