

Gargarin, zestaw do płukania zatok, uzupełniający, 32 saszetki

Cena: 12,70 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GARGARIN
Opakowanie	32 saszetek
Postać	Proszek
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Udrażniające nos, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Gargarin Zatoki to roztwór, który skutecznie oczyszcza nos i zatoki z bakterii, wirusów, alergenów i pyłu. Dodatkowo, nawilża śluzówkę, co przyczynia się do ochrony dróg oddechowych przed infekcjami.

Składniki

100% chlorek sodu Ph.Eur.

Zastosowanie

Preparat polecany do stosowania w przypadku:

- zapalenia zatok przynosowych, nieżyty nosa,
- alergicznego nieżyty nosa,
- po ekspozycji na alergeny (pyłki roślin, kurz, pierze, sierść zwierząt domowych),
- przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok,
- profilaktycznie w celu utrzymania higieny nosa i zatok,
- do oczyszczania nosa i zatok po kontakcie z powietrzem zawierającym duże stężenie pyłu.

Sposób użycia

- Do dołączonej do zestawu podstawowego Gargarin Zatoki butelki, wsyp zawartość 1 saszetki (roztwór izotoniczny) lub zawartość 2 saszetek (roztwór hipertoniczny).
- Napełnij butelkę przegotowaną i wystudzoną do temperatury ciała wodą. Ilość wody powinna się zgadzać do zaznaczonej linią wartości 240 ml.



- Zakręć butelkę i zakrywając palcem otwór, dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia się zawartości saszetki.
- Nachyl się lekko nad umywalką, przyłóż butelkę do jednego z otworów nosowych i swobodnie oddychaj przez usta.
- Ściśnij butelkę spokojnym, płynnym ruchem. Roztwór zostanie wprowadzony do nosa, a następnie wypłynie drugim roztworem nosowym. Połowa zawartości butelki powinna posłużyć do przepłukania jednego otworu nosowego.
- Następnie powtórz płukanie dla drugiego otworu nosowego pozostałym roztworem. Niewykorzystaną ilość roztworu wylej.
- Po wypłukaniu delikatnie oczyść nos poprzez wydychanie. Nie połkaj roztworu jeśli dostanie się do gardła.
- Po przepłukaniu nosa i zatok butelkę i zakrętkę Gargarin Zatoki umyj i pozostaw do wyschnięcia.

Przeciwwskazania

- Całkowicie zablokowany nos, infekcja ucha lub uczucie jego zatkania.
- Po odbytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować z lekarzem.
- Przed zastosowaniem u dzieci należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
- U dzieci stosowanie należy skonsultować z lekarzem.
- Do płukania nie używać nieprzegotowanej wody.

Producent

Farmina Sp. z o.o.,
ul. Lipska 44,
30-721 Kraków.