

Gargarin, zestaw podstawowy do płukania nosa i zatok, butelka (irygator) + 16 saszetek



Cena: 16,41 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	GARGARIN
Opakowanie	1 butelka + 16 saszetek
Postać	Proszek
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Udrażniające nos, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Roztwór **Gargarin Zatoki** skutecznie oczyszcza nos i zatoki z bakterii, wirusów, alergenów i pyłu, jednocześnie nawilżając śluzówkę. Działa ochronnie na drogi oddechowe, pomagając zapobiegać infekcjom.

Składniki

Chlorek sodu (100%).

Zastosowanie

Wyrób medyczny Gargarin Zatoki stosuje się do oczyszczania nosa i zatok:

- w zapaleniu zatok przynosowych lub nieżycie nosa,
- w alergicznym nieżycie nosa i po ekspozycji na alergeny (np. pyłki roślin, kurz, pierze, sierść zwierząt domowych),
- przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok,
- profilaktycznie w celu utrzymania higieny nosa i zatok,
- po kontakcie z powietrzem o dużym stężeniu pyłu.

Sposób użycia

- Do dołączonej do zestawu podstawowego Gargarin Zatoki butelki, wsyp zawartość 1 saszetki (roztwór izotoniczny) lub zawartość 2 saszetek (roztwór hipertoniczny).
- Napełnij butelkę przegotowaną i wystudzoną do temperatury ciała wodą. Ilość wody powinna się zgadzać do zaznaczonej linią wartości 240 ml.
- Zakręć butelkę i zakrywając palcem otwór, dokładnie wymieszaj aż do rozpuszczenia się zawartości saszetki.

- Nachyl się lekko nad umywalką, przyłóż butelkę do jednego z otworów nosowych i swobodnie oddychaj przez usta.
- Ściśnij butelkę spokojnym, płynnym ruchem. Roztwór zostanie wprowadzony do nosa, a następnie wypłynie drugim roztworem nosowym. Połowa zawartości butelki powinna posłużyć do przepłukania jednego otworu nosowego.
- Następnie powtórz płukanie dla drugiego otworu nosowego pozostałym roztworem.
- Niewykorzystaną ilość roztworu wylej.
- Po wypłukaniu delikatnie oczyść nos poprzez wydychanie. Nie połkaj roztworu jeśli dostanie się do gardła.
- Po przepłukaniu nosa i zatok butelkę i zakrętkę Gargarin Zatoki umyj i pozostaw do wyschnięcia.

Przeciwwskazania

- Całkowicie zablokowany nos, infekcja ucha lub uczucie zatkania.
- Po odbytej operacji ucha przed zastosowaniem należy się skonsultować z lekarzem.
- U dzieci stosowanie należy skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować preparatu po upływie jego daty ważności, która jest podana na opakowaniu.
- Nie należy używać nieprzegotowanej wody do płukania nosa.

Ważne wskazówki

- Gargarin Zatoki (zestaw podstawowy) należy przechowywać w temperaturze do 25°C, w oryginalnym opakowaniu i w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Preparat Gargarin Zatoki można stosować, będąc w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
- Wyrób medyczny Gargarin Zatoki nie ma negatywnego wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, bądź urządzeń mechanicznych.
- Nie należy stosować preparatu później niż na godzinę przed snem.
- Nie stosować po upływie daty ważności.
- Do płukania nie używać nieprzegotowanej wody.

Producent

Farmina Sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków