

Gima Digital Basal, termometr owulacyjny, elektroniczny

Cena: 44,84 zł

Opis słownikowy



Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	termometr
Producent	NOVAMED.PL S.A.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gima Basal Digital to elektroniczny termometr przeznaczony do pomiaru podstawowej temperatury ciała (PTC). Ten termometr owulacyjny jest niezwykle pomocny w naturalnym planowaniu rodziny. Podstawowa temperatura ciała (PTC) to temperatura mierzona zaraz po przebudzeniu, przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności. Pomiar PTC jest jednym z najprostszych i najbardziej ekonomicznych metod oceny cyklu miesięcznego, szczególnie przy ustalaniu momentu owulacji.

Stosowanie

Przed użyciem należy zdezynfekować sondę alkoholem lub umieścić osłonę na sondzie. Wciśnij przycisk zasilania; wydany zostaje dźwięk "beep". Po 2 sekundach zaczyna migać litera ° C lub ° F, teraz można rozpocząć pomiar. Podczas pomiaru pozostań w tym samym miejscu / pozycji do końca. Pomiar trwa około 2 minuty, a po jego zakończeniu termometr wydaje sygnał akustyczny. Wykryta temperatura jest pokazana na wyświetlaczu. Termometr wyłączy się automatycznie po około 10 minutach. Jednak aby przedłużyć żywotność baterii, najlepiej nacisnąć przycisk zasilania wkrótce po użyciu. Aby wyświetlić zapamiętaną wartość ostatniego pomiaru, naciśnij przycisk ON / OFF na 2 sekundy przy wyłączonym termometrze.

Zastosowanie

Owulacyjny elektroniczny termometr do pomiaru podstawowej temperatury ciała.

Ważne wskazówki

- Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania.
- Do czyszczenia termometru nie należy stosować benzenu, rozpuszczalników, benzyny oraz innych silnych środków chemicznych.
- Nie przetrzymywać czujnika termometru w alkoholu zbyt długo, ani nie sterylizować go gorącą wodą (wodą o temperaturze 50°C lub wyższą).
- Do czyszczenia termometru nie używać myjek ultradźwiękowych.
- Dezynfekować sondę tylko alkoholem lub podobnym środkiem.
- Nie gotować.
- Nie sterylizować w autoklawie.
- Produkt jest wodoodporny, dlatego można go myć pod bieżącą wodą, jednak nie należy go zanurzać zbyt długo.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI), Włochy