

Granugel, żel hydrokoloidowy do ran głębokich, 15 g

Cena: 13,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 g
Postać	Żel
Producent	CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Gojące, Wspierające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Granugel to zaawansowany żel hydrokoloidowy, który wspiera leczenie głębokich ran, w tym tych z obecnością martwicy suchej lub rozpułwnej.

Działanie

Granugel przeznaczony jest do leczenia ran o niepełnej lub pełnej grubości skóry, takich jak owrzodzenia podudzi i odleżyny. Żel tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, które wspomaga autolizę tkanek martwiczych.

Skład

Granugel jest jałowym żelem złożonym z hydrokoloidów (pektyna, karboksymetyloceluloza sodowa) umieszczonych w przezroczystym lepkiem podłożu.

Stosowanie

- Dokładnie przemyj ranę wodą sterylną, fizjologicznym roztworem soli sodowej (0,9% roztwór NaCl) lub innymi środkami stosowanymi rutynowo w praktyce klinicznej
- Osusz skórę wokół rany.
- Odkręć zakrętkę tuby i usuń biały pierścień zabezpieczający. Nałóż ponownie zakrętkę i przebij błonę zamykającą otwór tuby.
- Żel należy wprowadzić bezpośrednio do rany. Niektóre opakowania zawierają dodatkowy sterylny aplikator. Można go dodatkowo umocować do ujścia tuby, w celu ułatwienia aplikacji do głębokiej rany. Nie należy wypełniać jamy rany powyżej poziomu otaczającej skóry.
- Optymalne środowisko sprzyjające gojeniu rany można uzyskać pokrywając ranę opatrunkiem zatrzymującym wilgoć.
- Żel należy zmienić, gdy opatrunek wierzchni zaczyna przeciekać lub podczas rutynowej zmiany opatrunku.
- Przemyj ranę za pomocą odpowiedniego środka np. fizjologicznego roztworu soli (0,9% roztwór NaCl)
- Zaleca się zmianę opatrunku nie rzadziej niż co trzy dni w przypadku ran pokrytych martwicą rozpułwną, a co siedem dni w przypadku czystych, ziarninujących ran.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować u chorych wrażliwych na żel lub jeden z jego składników.

Ostrzeżenia

- Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta, do jednej rany i nie powinien być ponownie używany. Ponowne użycie może zwiększyć ryzyko infekcji oraz zakażenia krzyżowego. Fizyczne właściwości opatrunku mogą nie zostać zachowane w przypadku powtórnego życia.
- Kolonizacja ran przewlekłych jest częstym zjawiskiem i nie stanowi przeciwwskazania do stosowania żelu.
- Jeżeli w trakcie stosowania żelu podejrzewa się lub stwierdza rozwój zakażenia, należy wprowadzić właściwą antybiotykoterapię systemową. Stosowanie żelu może być kontynuowane, ale w takim przypadku postęp w gojeniu rany powinien być starannie monitorowany, a całość leczenia powinna być nadzorowana przez lekarza.
- Bezpieczeństwo stosowania żelu w oparzeniach III stopnia nie zostało dotychczas ustalone.
- Żel należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności w pielęgnacji głębokich ran z małymi otworami (wejście do rany), np. fistule / przetoki, w których usunięcie żelu może być trudne.
- Opatrunek uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizm autolizy w ranie, co prowadzi do oczyszczenia z martwiczych tkanek. Przez to rana może wydawać się większa podczas kilku pierwszych zmian opatrunku.
- Żel przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Producent
CONVATEC