

Grassolind Neutral, opatrunek z maścią, jałowy, 10 cm x 10 cm, 10 sztuk



Cena: 147,26 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Grassolind to sterylny opatrunek z maścią przeznaczony do leczenia ran. Nadaje się szczególnie do delikatnego zaopatrywania i elastycznego utrzymywania ran o dużej powierzchni, takich jak otarcia, rany miażdżone, oparzenia, sparzenia, a także po zabiegach takich jak kauteryzacja, uszkodzenia popromienne. Grassolind Neutral jest również odpowiedni do pokrywania miejsc pobrania skóry oraz nakładania przeszczepów, stosowany w transplantacji skóry, chirurgii plastycznej i kosmetycznej, dermatologii oraz po zabiegach chirurgicznych, takich jak usunięcie paznokci czy operacja stulejki.

Składniki

- Siatka tiulowa z czystej bawełny,
- Maść niezawierająca wody (biała wazelina, diglycerolester kwasów tłuszczowych jednokarboksylowych i dwukarboksylowych, воск mikrokryształiczny węglowodorowy).

Zastosowanie

Niezawierający substancji czynnych sterylny opatrunek z maścią, przeznaczony do leczenia ran.

Sposób użycia

- Wyjąć opatrunek z oboma nakładkami osłaniającymi z opakowania jednostkowego.
- W razie potrzeby przyciąć odpowiednio do wielkości rany.
- Usunąć nakładkę osłaniającą z jednej strony opatrunku i położyć go na ranę, po czym usunąć drugą nakładkę osłaniającą.
- W celu odprowadzenia wydzieliny z rany umocować ponad opatrunkiem z maścią jałowy opatrunek chłonny.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, zmieniać przy każdej zmianie opatrunku.

Właściwości

- Jałowy,
- Impregnowany neutralną maścią,
- Nie zawiera składników czynnych,
- Siatka bawełniana o dużych oczkach,
- Nie przykleja się do rany,
- Chroni przed jej wysychaniem,
- Zapobiega kurczeniu się blizny,
- Przepuszcza wydzielinę,
- Wymiary: 10 cm x 10 cm,
- Można go ciąć na kawałki o dowolnych wymiarach.

Ważne wskazówki

- Zawartość jałowa, dopóki opakowanie jednostkowe nie uległo zniszczeniu.
- Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji leżącej, w temperaturze poniżej 40°C.
- Opatrunku nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Producent

Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim, Niemcy

Galeria

