

Grassolind Neutral, opatrunek z maścią, jałowy, 5 cm x 5 cm, 10 sztuk



Cena: 42,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Grassolind to jałowy opatrunek z maścią przeznaczony do leczenia różnorodnych typów ran. Opatrunki są szczególnie skuteczne do delikatnego zaopatrywania i utrzymywania w elastycznym stanie ran o rozległej powierzchni, takich jak otarcia, rany miażdżone, oparzenia, sparzenia, a także rany po kauteryzacji oraz uszkodzenia popromienne. Grassolind Neutral może być także wykorzystywany do ochrony miejsc pobrania skóry i nakładania przeszczepów, stosowany w praktyce transplantacji skóry, chirurgii plastycznej, kosmetycznej, dermatologii oraz po zabiegach takich jak usunięcie paznokci czy operacja stulejki.

Składniki

- Siatka tiulowa z czystej bawełny,
- Maść niezawierająca wody (biała wazelina, diglycerolester kwasów tłuszczowych jednokarboksylowych i dwukarboksylowych, wosk mikrokryształiczny węglowodorowy).

Zastosowanie

Niezawierający substancji czynnych sterylny opatrunek z maścią, przeznaczony do leczenia ran.

Sposób użycia

- Wyjąć opatrunek z oboma nakładkami osłaniającymi z opakowania jednostkowego.
- W razie potrzeby przyciąć odpowiednio do wielkości rany.
- Usunąć nakładkę osłaniającą z jednej strony opatrunku i położyć go na ranę, po czym usunąć drugą nakładkę osłaniającą.
- W celu odprowadzenia wydzieliny z rany umocować ponad opatrunkiem z maścią jałowy opatrunek chłonny.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, zmieniać przy każdej zmianie opatrunku.

Właściwości

- Jałowy,
- Impregnowany neutralną maścią,
- Nie zawiera składników czynnych,
- Siatka bawełniana o dużych oczkach,
- Nie przykleja się do rany,
- Chroni przed jej wysychaniem,
- Zapobiega kurczeniu się blizny,
- Przepuszcza wydzielinę,
- Wymiary: 5 cm x 5 cm,
- Można go ciąć na kawałki o dowolnych wymiarach.

Ważne wskazówki

- Zawartość jałowa, dopóki opakowanie jednostkowe nie uległo zniszczeniu.
- Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji leżącej, w temperaturze poniżej 40°C.
- Opatunku nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Producent

Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
89522 Heidenheim, Niemcy

Galeria

