

Grip Stop, spray do nosa, 20 ml



Cena: 33,72 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 ml
Postać	Spray
Producent	VITAMED
Przeznaczenie	Gorączka, Infekcja, Katar
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Preparat **Grip Stop** to spray do nosa, który jest wyrobem medycznym stosowanym w celu udrożnienia nosa. Jest odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jego głównym działaniem jest zwalczanie kataru, nawet w przypadku uporczywej infekcji. Preparat ten można stosować już od pierwszych objawów przeziębienia i grypy.

Grip Stop działa miejscowo przeciwzapalnie, co pomaga w ułatwieniu oddychania przez nos. Chroni również błonę śluzową przed działaniem wirusów i bakterii, a także wspiera jej regenerację.

Składniki

D-pantenol, glicyryznian dwupotasowy, laktoferyna, karboksymetylko beta glukan, chlorobutanol, sól dwusodowa EDTA, N-hydroksymetylkglicynian sodu, polisorbitat 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy o pH 7,0.

Zastosowanie

- Stanach niedrożności nosa: Spray może pomóc w udrożnieniu nosa, gdy występuje uczucie zatkania nosa.
- Utrudnionym oddychaniu przez nos: Grip Stop może wspomóc ułatwienie oddychania przez nos, szczególnie w przypadku przekrwienia błony śluzowej nosa.
- Profilaktyka i terapia nadmiaru i zalegania wydzieliny: Preparat może być stosowany w celu regulacji ilości wydzieliny w nosie, zapobiegając nadmiernemu jej gromadzeniu się.
- Nieżyt nosa różnego pochodzenia: Grip Stop może być stosowany w przypadku infekcji, alergii oraz innych stanów, które powodują nieżyt nosa.

Sposób użycia

- Zdejmij nasadkę ochronną z pojemnika.
- Umieść kciuk jednej ręki na podstawie buteleczki, a jej palec wskazujący i palec środkowy na skrzydełkach dozownika.

- Przyciśnij dozownik w stronę dna butelki, a następnie zwolnij nacisk. Powtórz czynność kilkakrotnie, aż do uzyskania mgiełki.
- Pochyl głowę lekko do przodu.
- Wykonując powolny wdech i zatykając jeden z otworów nosowych palcem wolnej ręki, wsuń dozownik do drugiego otworu nosowego i przyciśnij 2 razy, by zaaplikować wyrób.
- Powtórz opisane wyżej czynności dla drugiego otworu nosowego.
- Oczyszcz dozownik i zamknij go nasadką ochronną.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na dowolny z jego składników.

Ostrzeżenia

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane po zastosowaniu preparatu Grip Stop, zaleca się przerwanie dalszego stosowania i skonsultowanie się z lekarzem. Jest to ważne, aby odpowiednio ocenić i zarządzać ewentualnymi reakcjami niepożądanymi.

Należy pamiętać, że wyrobów medycznych należy używać zgodnie z ich terminem ważności, który jest podany na opakowaniu.

Stosowanie produktu po upływie terminu ważności może prowadzić do utraty skuteczności lub wystąpienia nieprzewidywalnych działań niepożądanych.

Przy zastosowaniu preparatu Grip Stop należy unikać kontaktu z oczami. W przypadku przypadkowego dostania się produktu do oczu, należy je dokładnie przemyć czystą wodą i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki

Po zastosowaniu preparatu Grip Stop zaleca się staranne zamknięcie pojemnika, aby zapobiec przypadkowemu wyciekowi lub zanieczyszczeniu produktu.

Ważne jest również przechowywanie wyrobu medycznego Grip Stop w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć nieprawidłowego użycia przez nie. Ponadto, należy go przechowywać z dala od źródeł ciepła, ponieważ wysoka temperatura może wpływać na stabilność preparatu i jego skuteczność.