


Gruszka, z kanką nr 11 (Kej)

Cena: 22,74 zł

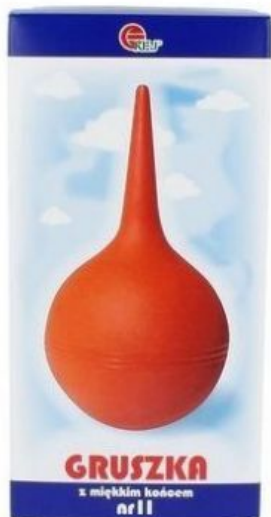

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	gruszka
Producent	PPHU KEJ SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gruszka z kanką

- wyrób medyczny
- nr 11
- pojemność: 290 ml

Wskazania

Gruszka z kanką przeznaczona jest do wykonywania lewatywy doodbytniczej zarówno u dzieci, jak i dorosłych w celu łagodzenia zaparć, kolek brzusznych, przed zabiegami chirurgicznymi w okolicach jamy brzusznej.

Sposób użycia

- Przed każdym użyciem gruszki z kanką do wykonania lewatywy, jak i po jej zakończeniu, należy starannie ją umyć w ciepłej wodzie z mydłem, oddzielając kankę od gruszki.
- Wymyte części wygotować w wodzie przez 10 minut. Następnie zamontować kankę, wkładając jej krótszy koniec do otworu gruszki, aż do oparcia się kołnierza kanki o krawędź gruszki.
- Napełnić gruszkę rumiankiem, roztworem soli fizjologicznej lub innym roztworem zaleconym przez lekarza.
- Zastosowana ciecz powinna mieć temperaturę od 32 do 34 °C.
- Kankę posmarować cienką warstwą wazeliny kosmetycznej i powoli wprowadzić do odbytu bez wywierania ucisku, po czym nacisnąć gruszkę w taki sposób, aby opróżnić jej zawartość do jelita.
- Po wykonaniu tej czynności ścisnąć pośladki i wyjąć kankę z odbytu.
- Do zapobieżenia wycieku wprowadzonego płynu należy jeszcze przez kilka minut trzymać ściśnięte pośladki.

Ostrzeżenia

- Gruszkę należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Każde wykonanie lewatywy winno być skonsultowane z lekarzem.
- Gruszka z kanką jest wyrobem indywidualnego użytku.
- Lewatywy nie należy wykonywać samodzielnie.
- Zabrania się wykonywania lewatywy przez dzieci.
- Lewatywy mogą być wykonywane w warunkach domowych, bądź szpitalnych.

Producent

KEJ
Sygńczów 1
Wieliczka